




Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tél : (909) 783-1841 • USA & Canada (800) 368-9777

Ces instructions s'appliquent aux articles suivants :

REF 1770
1780

1

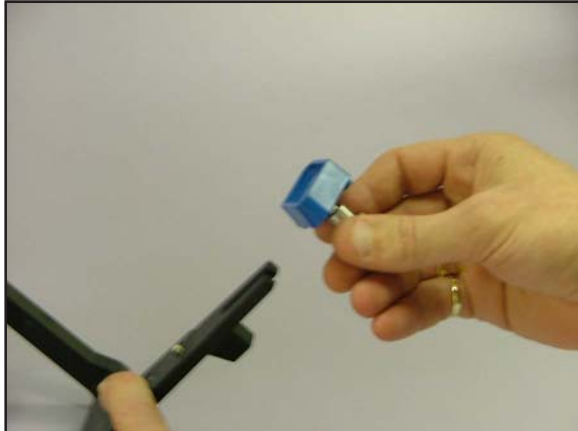

Ôter la table incisale en plastique de l'articulateur.

2




Placez le table incisale et verrouillez sa position à l'aide d'une petite vis moletée.

3




Ajustez l'élément de direction incisale désirée et verrouillez sa position à l'aide d'une grande vis moletée.

4

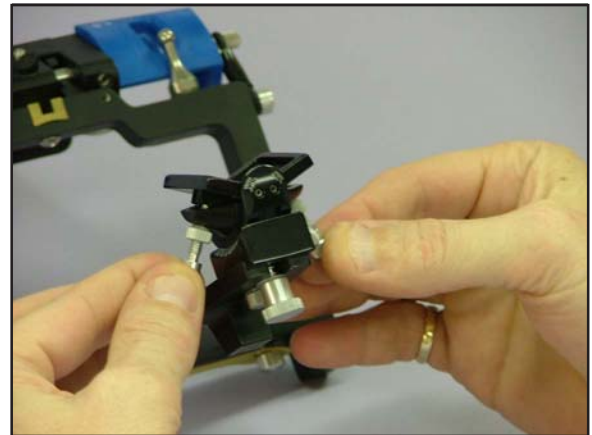


Ajustez l'élément de direction incisale latérale désiré à l'aide des vis d'ajustement latéral/

5

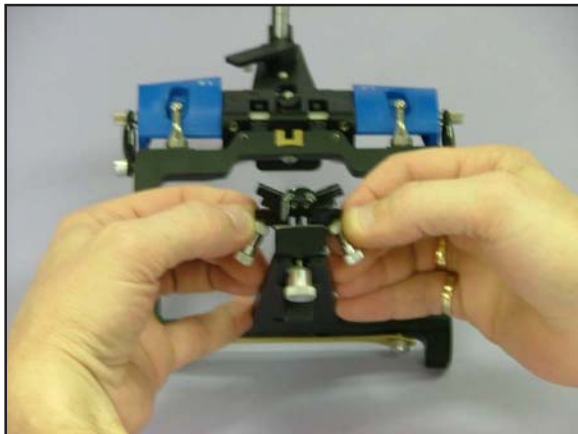

Verrouillez ce dernier en serrant les écrous latéraux.

6

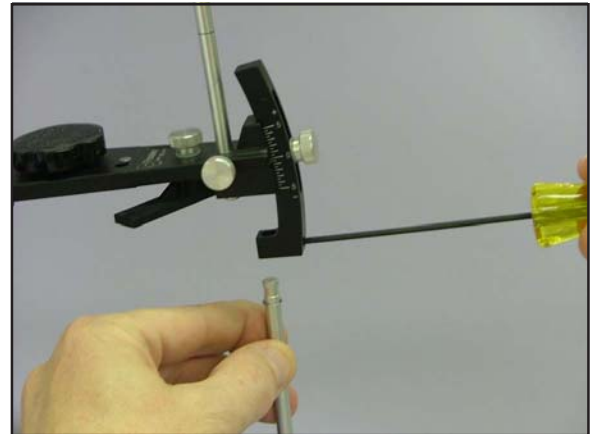

Pour l'articulateur PCH (présenté), placez une nouveau point de broche incisale à l'aide d'une clé hexagonale. Pour l'articulateur SH ou PSH, inversez la broche incisale, le point de broche tourné vers le bas.

