

## Instructions relatives à la colonne de test de

**1**

Attachez la colonne de test au cadre inférieur de l'articulateur à l'aide de la vis de la plaque de montage. Si vous utilisez une colonne de test magnétique, placez-la sur la plaque de montage magnétique.

**2**

Attachez la plaque de montage standard au cadre supérieur de l'articulateur à l'aide de la vis de la plaque de montage. Si vous utilisez une plaque de montage magnétique, placez le plateau d'indexation en plastique sur celle-ci.


**3**

4



Placez l'anneau de rétention PCV au-dessus de la colonne de test pour contrôler le plâtre.

5

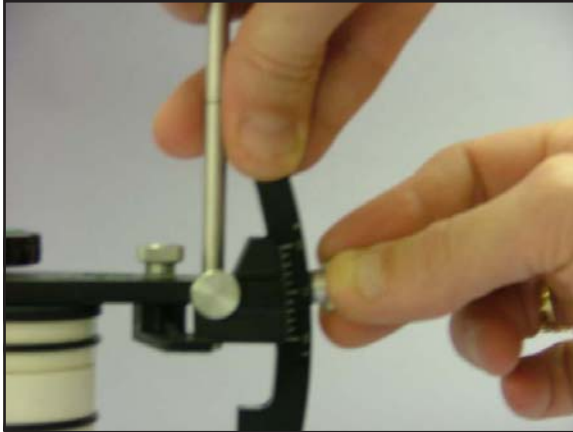


Placez la cheville incisive à zéro et assurez-vous que l'attache centrale est engagée.

6




Appliquez le spray lubrifiant de silicone sur la surface supérieure de la colonne de test ainsi que sur les cadres de l'articulateur pour que le plâtre n'adhère pas.

7

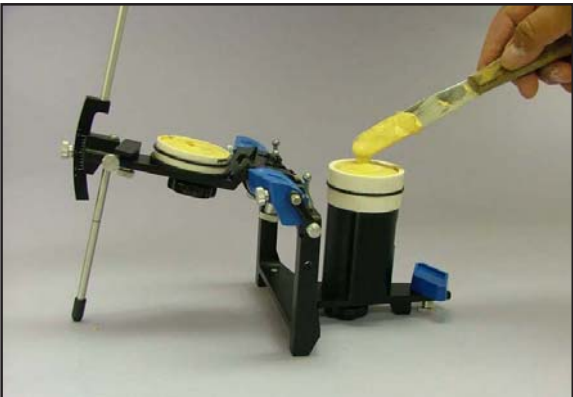

Placez du plâtre de haute qualité sur la plaque de montage et remplissez l'intérieur du moule jusqu'en haut sur la colonne de test.

Tournez le cadre supérieur de l'articulateur jusqu'à ce que la cheville incisive touche le plateau incisif en créant une connexion avec les deux parties de plâtre mou.

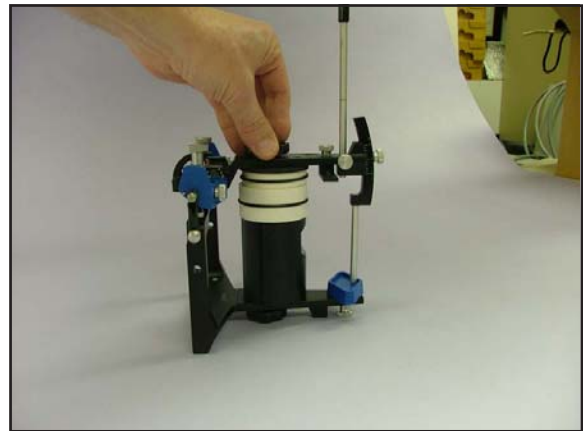


8

Une fois que le plâtre a pris, désengagez l'attache centrale et soulevez le cadre supérieur de l'articulateur avec l'index en plâtre de la colonne de test.



9

Retirez l'anneau de rétention du plâtre PCV de la colonne de test ou de l'index du plâtre.

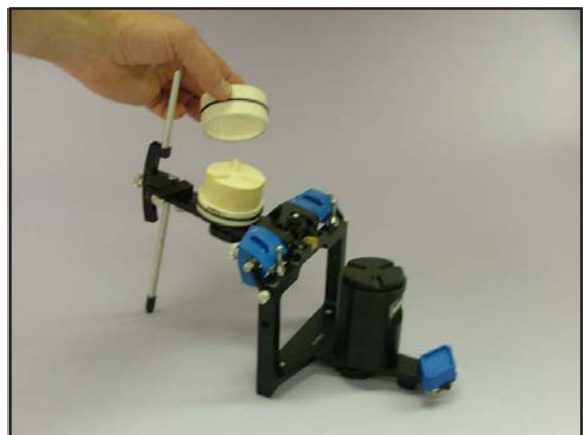


10

Retirez la colonne de test et l'index en plâtre de la plaque de montage de l'articulateur. Retirez les morceaux de plâtre des bords de l'index et nettoyez la colonne de test. Le numéro de série de l'articulateur et la date peuvent être inscrits sur l'index en plâtre pour référence ultérieure.



11

# 12

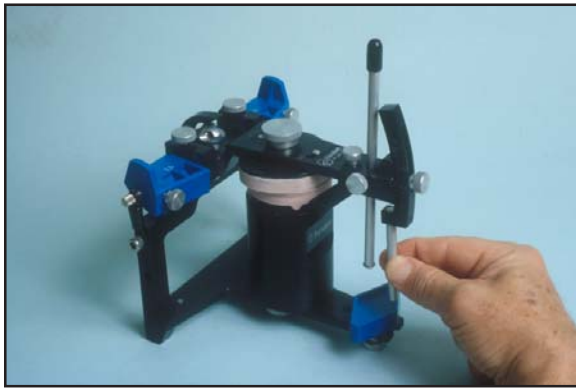

Remplacez la colonne de test et l'index en plâtre de la plaque de montage sur l'articulateur et tournez le cadre supérieur de l'articulateur jusqu'à ce que l'index en plâtre touche la colonne de test.

# 13



Vérifiez la précision du réglage entre l'index en plâtre et la colonne de test. La colonne de test et l'index en plâtre peuvent être placés sur d'autres articulateurs de modèle « P » pour tester leur caractère interchangeable. Si des écarts sont constatés, veuillez contacter le support clientèle de Panadent.