



Placez les matériaux d'enregistrement d'occlusion, la cire, le composé chauffé ou pressez une *table occlusale* sur chacun des six emplacements suivants : molaire gauche, molaire droite et incisive sur les surfaces **supérieure** et **inférieure** (six points) sur une fourchette occlusale propre et sèche.

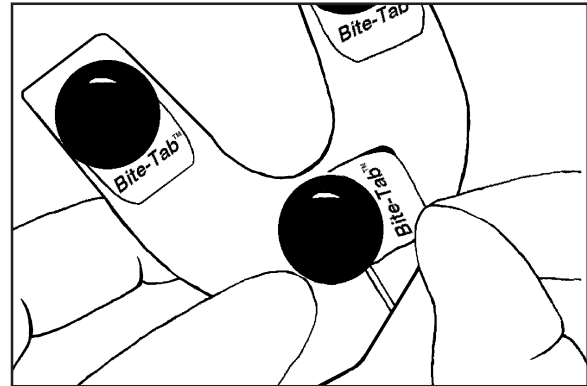

1


Placez l'extrémité intra-buccale de la fourchette dans un bol de mélange souple contenant de l'eau du robinet chaude (125°F / 40°C) durant trente secondes à une minute environ pour ramollir les disques de matériau de *table occlusale*. (Le composé mou peut être moulé avec les doigts avant d'être placé dans la bouche pour mieux entrer en contact avec les dents, si besoin.)

Ne placez pas la fourchette occlusale dans un bain d'eau normal-, car des résidus de cire et d'huiles présents dans ce bain pourraient empêcher l'adhésion des *tables -occlusales* à la fourchette -occlusale.

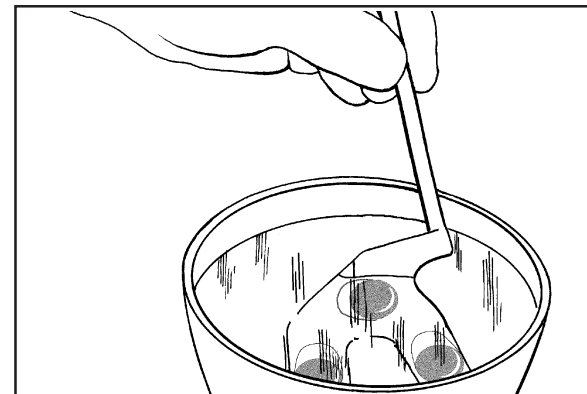


2

Placez la fourchette occlusale dans la bouche avec la tige du côté droit du patient et pointant droit devant. Positionnez la fourchette avec la marque de ligne médiane alignée avec le milieu du plan sagittal de la tête. Demandez au patient de fermer la mâchoire en appuyant légèrement sur le composé mou et d'ouvrir la bouche juste avant que ses dents n'entrent en contact avec la fourchette en métal. Pour les patients édentés, utilisez une fourchette à dentition complète pour enregistrer le contour de la morsure dans la bouche du patient.

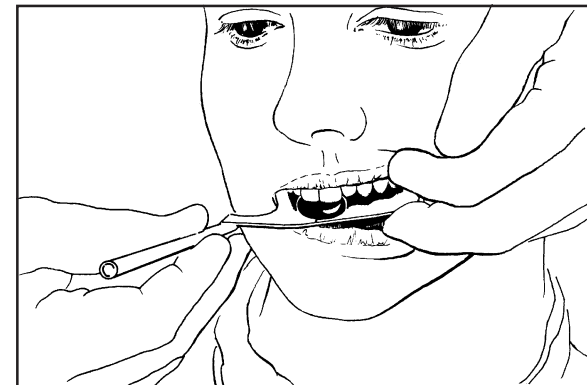

3


Retirez la fourchette de la bouche du patient et faites durcir les disques de composé sous l'eau froide ou placez la fourchette dans un bol de mélange souple contenant de l'eau froide pour durcir le composé.

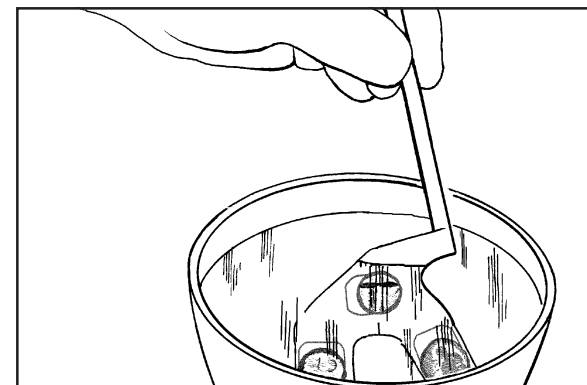

4


Instructions pour fourchette occlusale

5

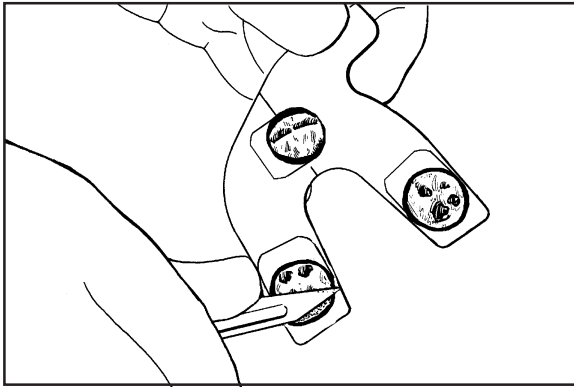

Retirez l'excès de composé en ne laissant pas plus de 1 mm de profondeur d'impression des pointes et des bords des incisives. Retirez aussi toutes les zones d'édentation d'extension distale en ne laissant que la petite partie de l'arête avec une gencive attachée dense pour soutenir la fourchette dans la bouche. Retirez toutes les particules de composé détachées à l'aide d'une brosse souple ou d'air comprimé.

6

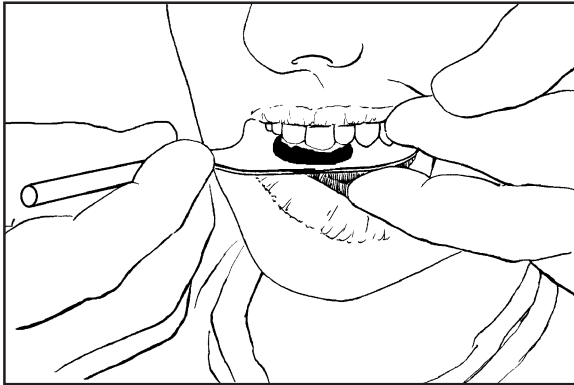

Placez la marque de la fourchette d'occlusion contre les dents maxillaires du patient et demandez-lui de mordre fort dans les indentations d'origine en utilisant la mâchoire inférieure pour soutenir la fourchette d'occlusion.