



## Instructions relatives au support de la fourchette magnétique.

**1**

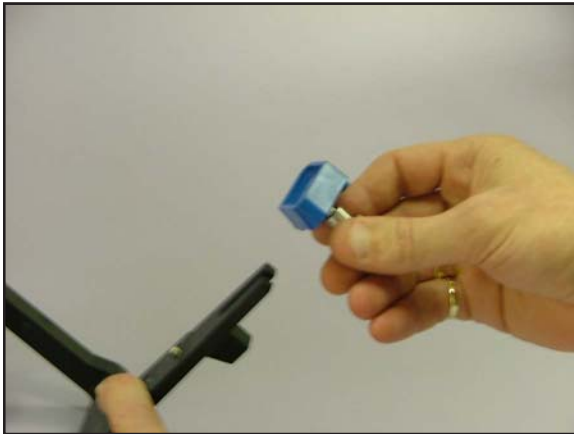


Ôter la table incisale en plastique de l'articulateur.

**2**

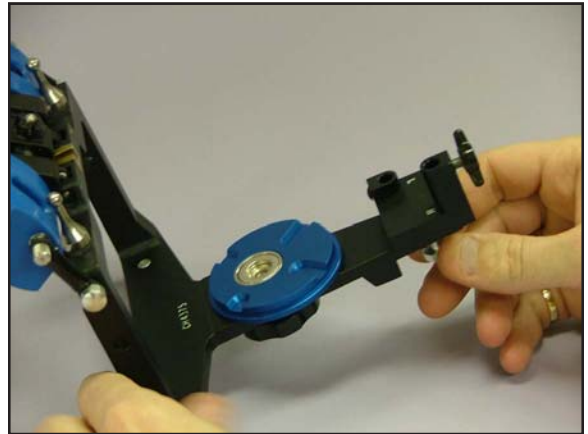


Placez l'élément de montage dans la fente de la table incisale et fermez à l'aide d'une vis moletée.

**3**

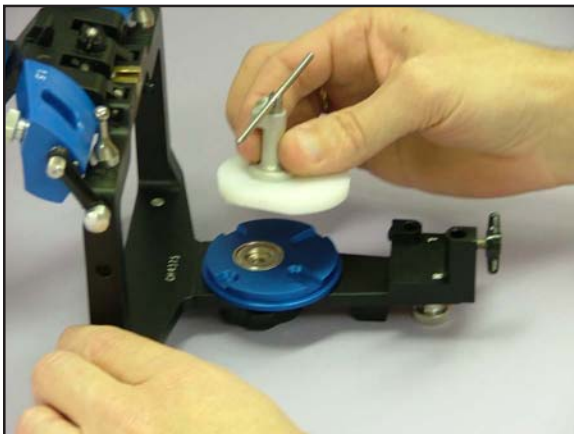


Indexez le support de la fourchette magnétique sur la plaque de montage magnétique, sur le cadre inférieur de l'articulateur.

**4**

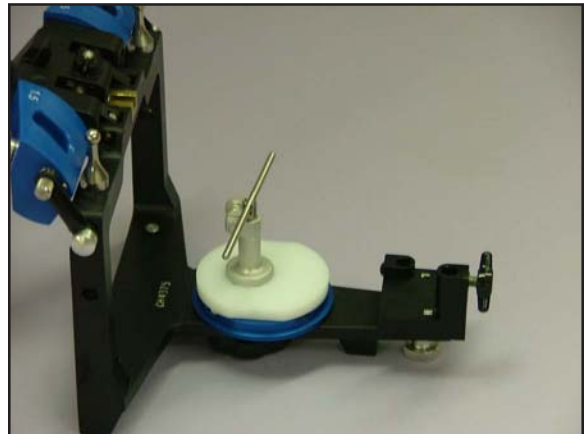

Assurez-vous que le support du moule est complètement ajusté.

**5**

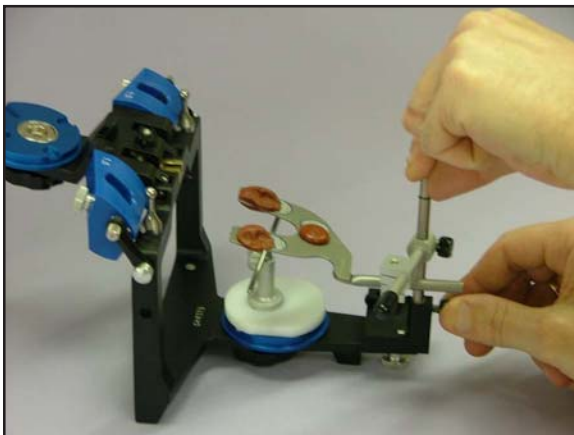

Placez et fixez l'assemblage de la fourchette dans l'ensemble de montage.

**6**



Tirez doucement le support du moule vers le haut, jusqu'à ce qu'il touche la fourchette et verrouillez-le en position à l'aide de la vis moletée. Installez le moule d'étude de la manière habituelle.