




Panadent Corporation  
 580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
 (909) 783-1841 • USA & Canada (800) 368-9777

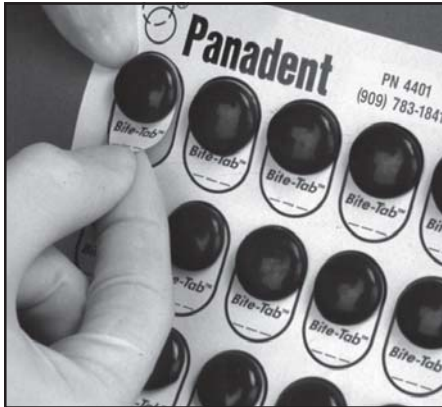

**1.** Pliez précisément la feuille de protection près de l'extrémité imprimée et ôtez la bande de la **table occlusale** en tirant sur l'extrémité imprimée. (Ne touchez pas à l'adhésif situé en-dessous de la table.)

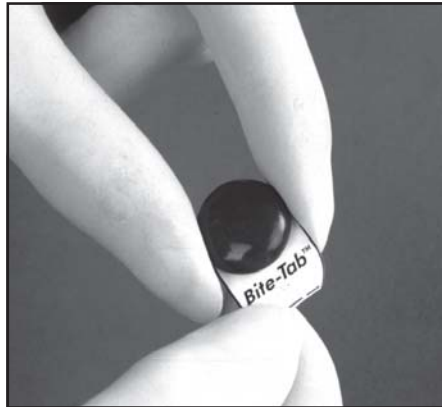

**2.** Maintenez le matériel de la **table occlusale** sur les bordures latérales de la bande. (Repliez la bande adhésive de la ligne perforée pour un enlèvement plus facile de la bande de **table occlusale** de la fourchette après utilisation.)

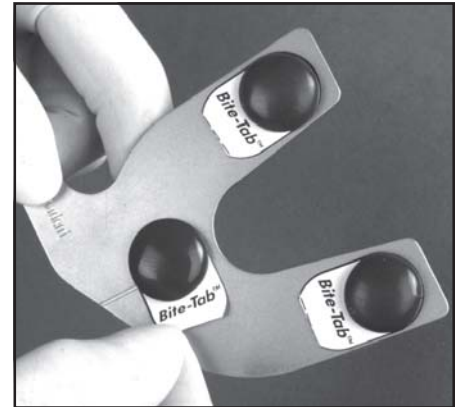


**3.** Posez en appuyant une bande d'**occlusion** sur chacune des zones suivantes : molaire gauche, molaire droite et incisives des deux côtés sur les deux côtés d'une fourchette occlusale propre. (Ne recouvrez pas la marque de ligne médiane sur la fourchette occlusale.)




**4.** Maintenez la fourchette occlusale dans de l'eau du robinet chaude (125°F / 40°C) durant une minute environ pour ramollir le matériau de la **table occlusale**. (Ne placez pas la fourchette occlusale dans le bain d'eau, car des résidus de cire et d'huiles présents dans ce bain pourraient empêcher l'adhésion de la **table occlusale** à la fourchette occlusale.)




**5.** Demandez au patient de mordre lentement dans le matériau de la **table occlusale** afin d'obtenir des empreintes occlusales maxillaires et mandibulaires d'environ 1mm de profondeur. (Évitez tout contact occlusal avec la fourchette occlusale.) Ôtez la fourchette occlusale et faites refroidir le matériel de **table occlusale** à l'aide d'air comprimé ou d'eau froide.

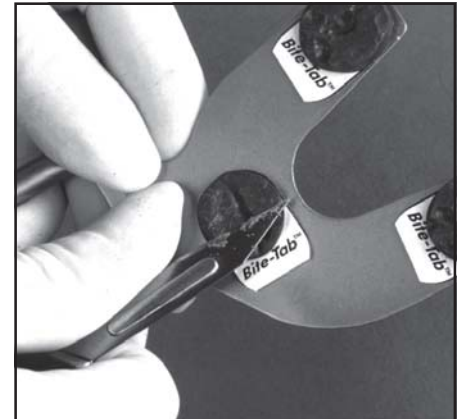


**6.** Ôtez le matériau en excès en laissant environ 1mm de profondeur de dent ou d'empreintes.

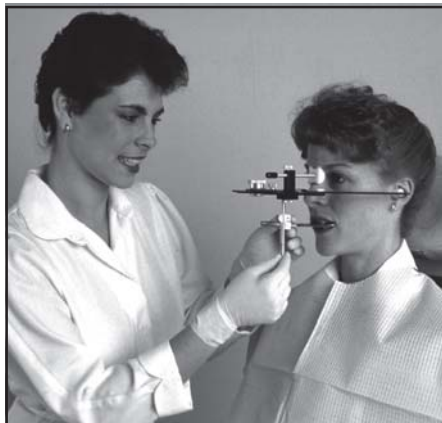

**7.** Remplacez la fourchette occlusale entre les dents du patient et attachez l'outil d'inclinaison faciale à la fourchette occlusale de la manière habituelle.

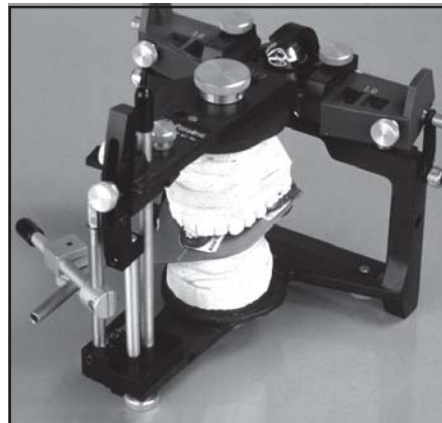

**8.** Montez la prothèse maxillaire sur l'articulateur à l'aide de la fourchette occlusale. (dans cette image, un assemblage de fourchette occlusale détachable avec élément de montage est présenté.)

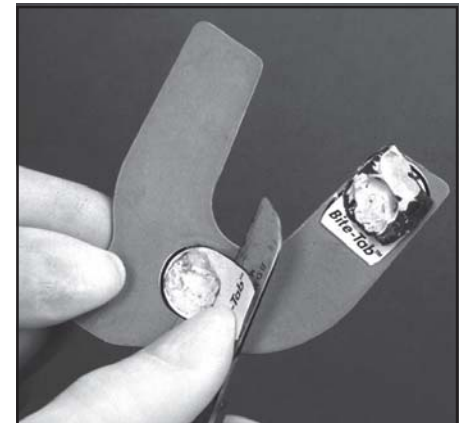

**9.** Pour ôter les tables utilisées trempez la fourchette occlusale dans de l'eau chaude pour ramollir légèrement le matériau. Utilisez un couteau de laboratoire pour ôter les bandes adhésives.