


# PAL™ - Instructions Articulateur Plastique Léger

## *Crée un lien fonctionnel entre les articulateurs jetables et semi-ajustables !*

- Axe de rotation anatomique  
(semblable à l'articulateur pleine taille)

- Guides horizontaux et verticaux

- Base de support intégrée

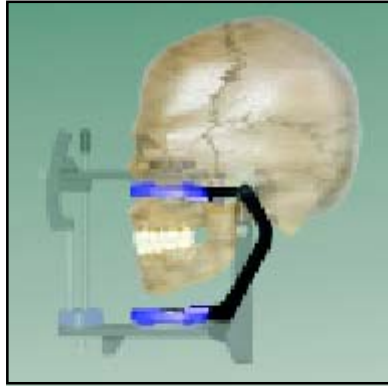


- Plaque de montage de nouvelle conception

Un indice pour PAL...


Un autre pour l'articulateur

- Jetables ou semi-réutilisables

- Ouvrez à 100° pour séparer les cadres

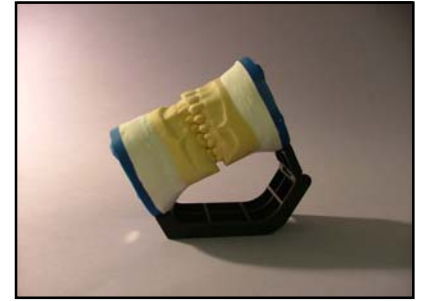

### Instructions :

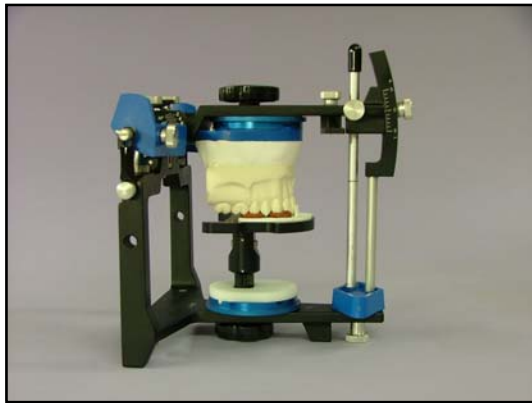

1. Montez les moules d'étude sur les plaques de montage magnétiques sur l'articulateur Panadent pleine taille (modèle PCH, PSH) à l'aide de l'analyseur dento-facial Kois ou de l'outil de calcul de la courbe de visage Pana-Mount et d'un enregistrement inter-occlusal.



2. Ôtez les plaques de montage attachées aux moules d'étude sur l'articulateur Panadent pleine taille. Clipez le nouvel articulateur Panadent PAL dans le port de réception situé à l'arrière de la plaque de montage magnétique en plastique.



3. Une fois les procédures laboratoires de restaurations achevées, l'articulateur PAL peut être détaché des moules d'étude en appuyant sur le bouton d'ouverture situé en bas de la plaque de montage magnétique en plastique.



4. Les moules d'étude peuvent désormais être replacés dans l'articulateur Panadent pleine taille afin que la qualité des restaurations puisse être contrôlée via l'outil de guidage du mouvement curvi-linéaire et que les ajustements fins soient réalisés si nécessaire.