

 Panadent Corporation
 580 S. Rancho Avenue Colton, California 92324, USA
 (909) 783-1841 USA & Canada (800) 368-9777

Ces instructions s'appliquent à l'article suivant :

REF4410



1. Placez les tables d'empreinte sur le côté supérieur de la fourchette. Trempez le composé dans de l'eau chaude (125°F ou 40°C).

2. Placez la fourchette dans la bouche du patient et notez l'indice des dents maxillaires dans le composé de la table d'empreinte. Ôtez, refroidissez et remplacez pour vérifier la précision.

3. Évaluez la courbe de Spee des dents inférieures afin de déterminer si le stabilisateur de la fourchette doit être modifié. La plupart du temps, leurs deuxième molaires entrent en contact avec la fourchette, entraînant un pivot.



4. Séchez le bas de la fourchette à l'aide d'un tissu ou à l'air comprimé.

5. Modifiez si nécessaire le stabilisateur de la fourchette et coupant sa portion postérieure.

6. Ôtez la couche de papier du stabilisateur de la fourchette.



7. Fixez le stabilisateur sur le côté inférieur sec de la fourchette.

8. Les éléments qui ont été précédemment coupés peuvent être jetés ou rajoutés sur la zone où ils pourraient être nécessaires.

9. Une fois la fourchette replacée dans la bouche du patient, demandez-lui de fermer la bouche sur la mousse jusqu'à ce que cette dernière soit stable. Exécutez la procédure d'arc facial. Enlevez le stabilisateur de fourchette avant la procédure de montage.