

Ajustement de la vis de la plaque de montage.

1. Enlevez la vis de réglage de la plaque de montage de l'articulateur en la dévissant depuis le cadre de l'articulateur.



2. Dévissez légèrement la vis de fixation de la vis de réglage à l'aide d'une clé hexagonale.



3. Appuyez à l'aide de votre doigt sur la tige de la vis de réglage.



4. Ressez vis de fixation de la vis de réglage à l'aide d'une clé hexagonale. Remplacez l'assemblage de la vis de montage dans l'articulateur.

