

Proxi-Fit™ Instructions

(pour la réalisation de contacts interproximaux)



1. Prenez une bande de rubans de test à l'aide de forceps stériles ou de pinces en coton. Découpez le nombre désirés de rubans de test (généralement trois) pour créer un paquet individuel.



2. Tenez la base en papier du paquet à l'aide de la main gauche. Avec l'index de la main droite, faites passer l'extrémité du ruban du paquet fermement tenu par dessus l'index de la main gauche.



3. Tordez la feuille transparente et maintenez-la contre la base en papier entre le pouce et l'index de la main droite.




4. Pincez les feuilles de protection transparente et en papier avec les pouces et les index des deux mains à la base des rubans afin de les froisser et de permettre aux rubans dénudés de se dresser.



5. Une fois froissée, la base en papier transparent et imprimé fait un bon stand permettant de maintenir le paquet droit.



6. Prenez la poignée du forceps à l'aide des quatre doigts de la main droite, joignez les poignets pour supporter les deux. Appuyez sur le bouton à l'aide du pouce droit pour ouvrir les mâchoires du

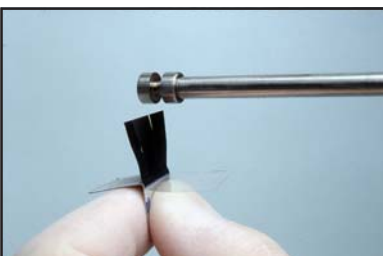

7. Les mâchoires du forceps ouvertes, amenez ces dernières au-dessus du ruban de test libre le plus latéral.




8. Relâchez lentement le bouton maintenu avec le pouce pour tenir fermement le ruban.



9. Avec une brève secousse, tirez le ruban dans votre direction pour le détacher de l'adhésif du paquet.



 3060: En cas d'utilisation non unique, une contamination du patient peut survenir.