


1 Entfernen Sie den Inzisaltisch aus Kunststoff vom Artikulator




2 Platzieren Sie den einstellbaren Inzisaltisch und befestigen Sie ihn mit der kleinen Fingerschraube.




3 Stellen Sie die Inzisalführung wie gewünscht ein und befestigen Sie sie mit der großen Fingerschraube.

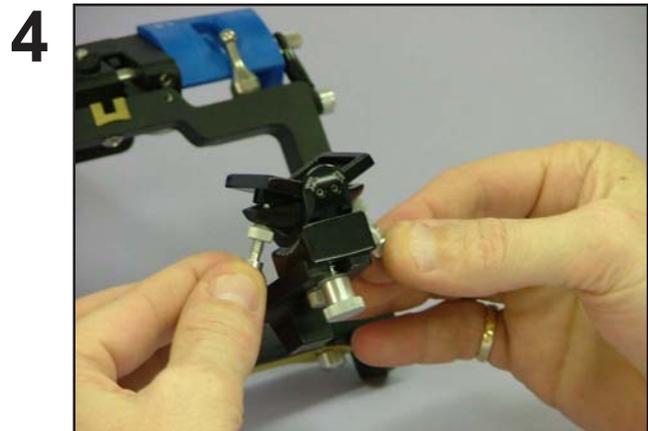

4 Stellen Sie die gewünschte seitliche Führung mit den seitlichen Einstellschrauben ein.

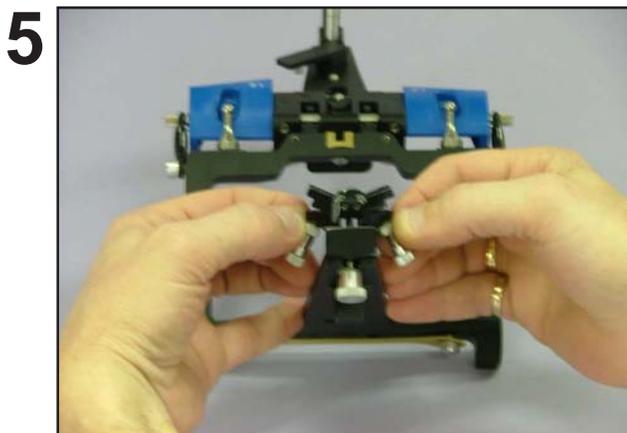

5 Befestigen Sie die seitliche Führung, indem Sie die seitlichen Kontermuttern festziehen.

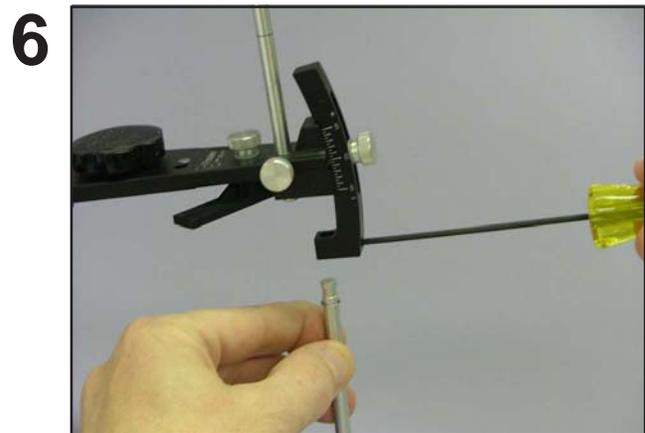

6 Platzieren Sie bei dem (dargestellten) PCH-Artikulator den neuen Löffelpunkt-Inzisaltift mit dem Sechskantschlüssel. Drehen Sie beim SH- oder PSH-Artikulator den Inzisaltift um, sodass der Löffelpunkt nach unten weist.