

## Anweisungen für die Artikulator-Testsäule



1

Befestigen Sie die Testsäule mithilfe der Montageplattenschraube am unteren Rahmen des Artikulators. Falls Sie eine magnetische Testsäule verwenden, platzieren Sie die Testsäule an der magnetischen Montageplatte.



2

Befestigen Sie die Standard-Montageplatte mithilfe der Montageplattenschraube am oberen Rahmen des Artikulators. Wenn Sie eine magnetische Montageplatte verwenden, platzieren Sie das Kunststoff-Rastenscheibe an der magnetischen Montageplatte.




3

4



Platzieren Sie den PCV-Haltering oben auf der Testsäule, um den Gips zu kontrollieren.

5

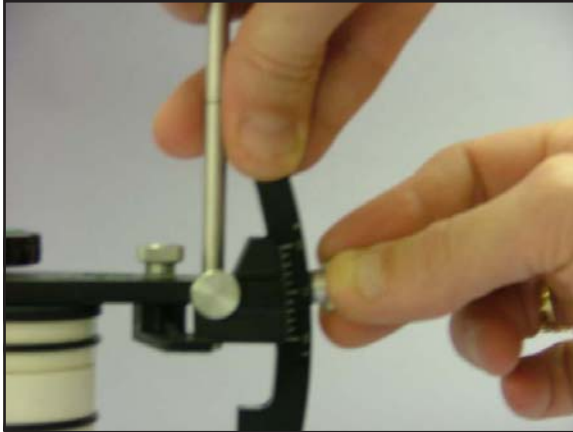


Stellen Sie den Inzisalstift auf null und achten Sie darauf, dass der mittlere Riegel eingerastet ist.

6




Bringen Sie Silikon-Schmiermittelspray auf die obere Fläche der Testsäule und die Rahmen des Artikulators auf, damit der Gips nicht haften bleibt.

7

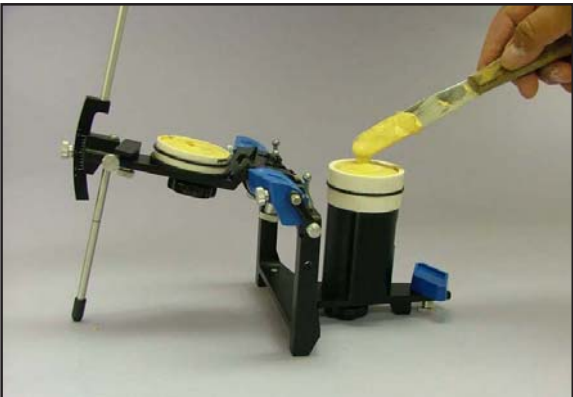

Platzieren Sie einen hochwertigen Stein auf der Montageplatte und füllen Sie das Innere der Gipshalterung bis zur Oberseite der Testsäule.

Drehen Sie den oberen Rahmen des Artikulators, bis der Inzisalstift den Inzisaltisch berührt und eine Verbindung zwischen den beiden weichen Gipspolstern schafft.

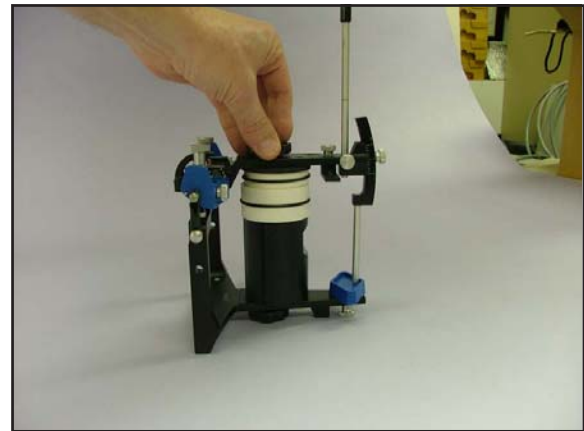


8

Nachdem sich der Gips gesetzt hat, lösen Sie den mittleren Riegel und heben den oberen Rahmen des Artikulators mit dem Steinindex von der Testsäule.



9

Entfernen Sie den PCV-Gips-Haltering von der Testsäule oder vom Gipsindex.

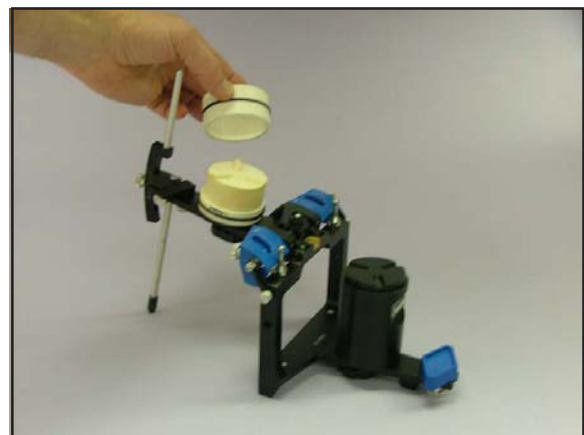


10

Entfernen Sie die Testsäule und den Montageplatten-Steinindex vom Artikulator. Entfernen Sie alle Grate des Steinmaterials von den Kanten des Steinindex und reinigen Sie die Testsäule. Die Seriennummer und das Datum können als spätere Referenz auf dem Steinindex notiert werden.



11

# 12

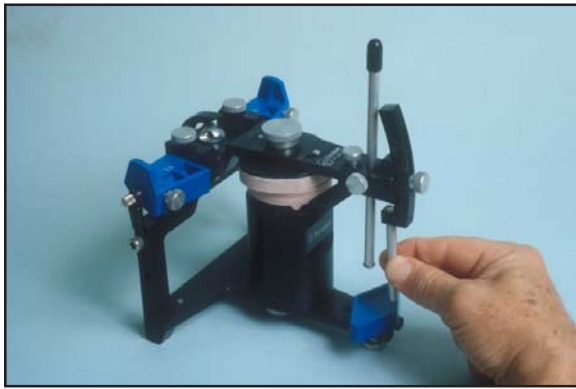

Bringen Sie die Testsäule und den Montageplatten-Steinindex wieder auf dem Artikulator an und drehen Sie den oberen Rahmen des Artikulators, bis der Steinindex die Testsäule berührt.

# 13



Überprüfen sie die Sitzgenauigkeit zwischen Steinindex und Testsäule. Testsäule und Steinindex können auf anderen Artikulatoren vom Typ "P" platziert werden, um die Auswechselbarkeit zu überprüfen. Falls Sie Diskrepanzen feststellen, fordern Sie telefonisch Unterstützung von Panadent an.