

# Grundlegendes Artikulatoremodul Anweisungen

Einleitung

Komponentenbezeichnung

Face-Bow (Ohr-Nasenwurzel) Anweisungen

Montageanweisungen für maxillaren Abdruck

Anweisungen für die Interokklusalregistrierung

- Zentrische Beziehung
- Vorstehend
- Links lateral
- Rechts lateral

Anweisungen für den mandibulären Abdruck

Artikulatoranpassungen (vorstehend)

Artikulatorfunktionen


Magna-Split II Anweisungen

## GRUNDLEGENDE SYSTEMKOMPONENTEN



1. Artikulator (Modell PCH dargestellt)
2. Artikulator-Stützfüße (nicht dargestellt)
3. **Pana-Mount**™ Gesichtsbogen
4. **Bio-Ästhetik** Niveaumesser
5. Kunststoffkoffer
6. Mandibuläres Montagegestell
7. Magna-Split II System (not dargestellt)
8. **Bite-Tray**™ Registrierungsplatten (20)
9. **Bite-Tab**™ Mischungsplatten (180)
10. Grundlegendes Bedienungshandbuch

## GESICHTSBOGEN-KOMPONENTEN:

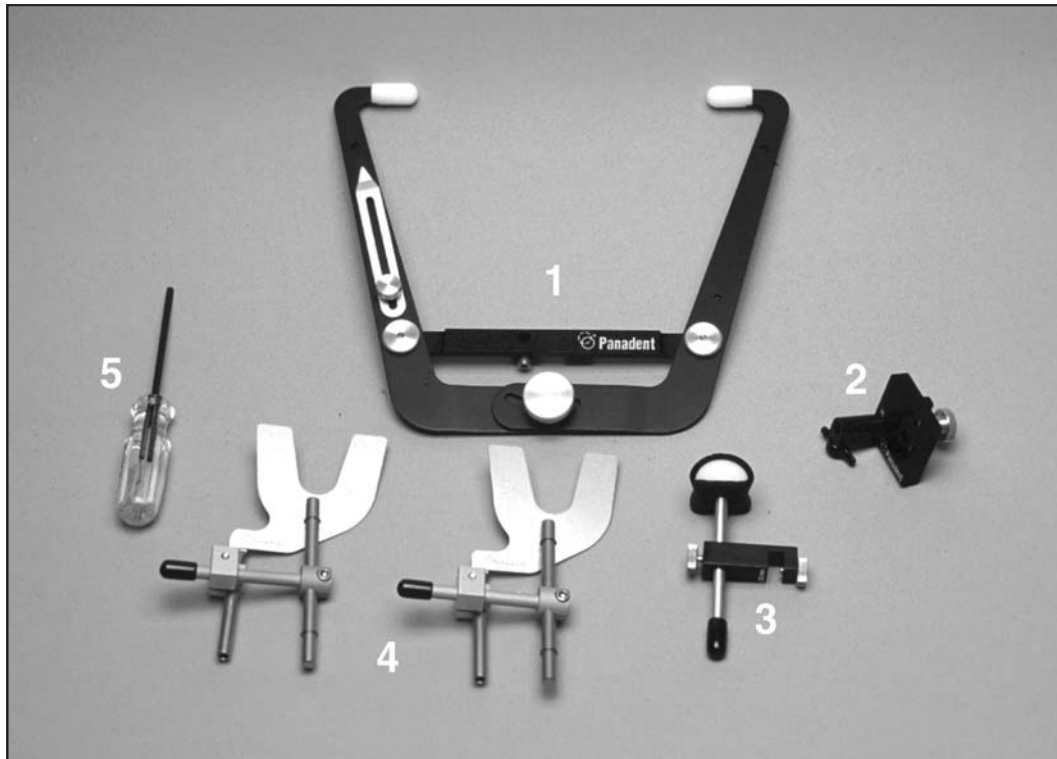

1. ***Pana-Mount*** Gesichtsbogen (Rahmen)
2. Montagevorrichtung
3. Nasenwurzel-Relator (22 mm)
4. Bissgabel & Stiel (je 2)
5. Sechskantschlüssel