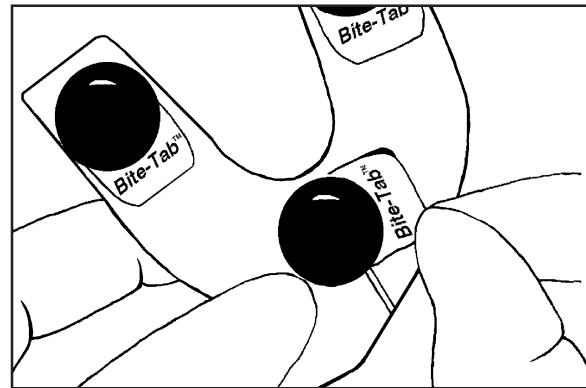
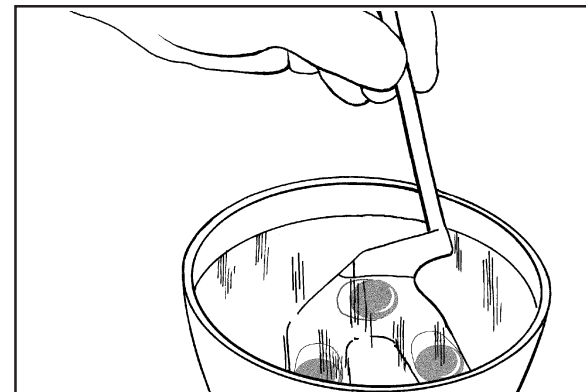


Platzieren Sie Bissregistriermaterial, Wachs und die erhitzte Mischung oder drücken Sie einen *Bite-Tab* auf jede der folgenden Stellen: linker Backenzahn, rechter Backenzahn und Schneidezahn an den **oberen** und **unteren** Flächen (sechs Tabs) auf der sauberen, trockenen Bissgabel



1

Platzieren Sie das intraorale Ende der Bissgabel in einer flexiblen Rührschüssel mit heißem Leitungswasser (125 °F / 40 °C) ungefähr eine halbe Minute bis zu einer Minute, um die *Bite-Tab*-Mischungsplatten zu erweichen. (Die weiche Mischung kann, wenn erforderlich, mit den Fingern vor der Platzierung im Mund für einen besseren Kontakt mit den Zähnen geformt werden.)


Nicht die Bissgabel in das reguläre Wasserbad -legen, da Wachsreste und Öle im Wasserbad die Haftung der *Bite-Tabs* an der Bissgabel -verhindern.)


2

Platzieren Sie die Bissgabel im Mund des Patienten mit dem Stiel auf der rechten Seite des Patienten und geradeaus nach vorne zeigend. Positionieren Sie die Bissgabel mit der Mittellinien-Markierung auf der Gabel ausgerichtet an der sagittalen Mittelebene des Kopfes. Leiten Sie den Patienten an, die Zähne mit leichtem Druck in die weiche Mischung zu schließen und den Mund unmittelbar zu öffnen, bevor die Zähne die Metallbissgabel berühren. Für zahnlose Patienten verwenden Sie die Vollprothesen-Bissgabel, um den Bissrand im Mund des Patienten zu indexieren.

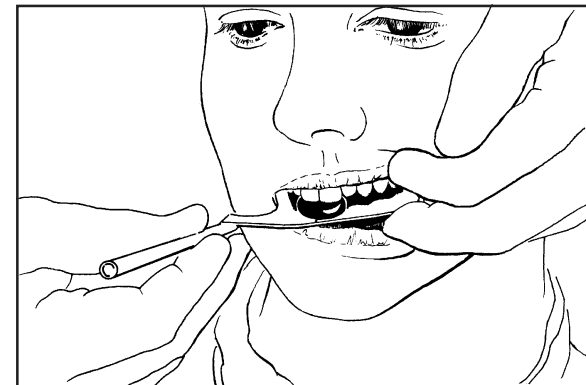

3

Entfernen Sie die Bissgabel aus dem Mund des Patienten und härten Sie die Mischungsplatten unter kaltem laufendem Leitungswasser oder platzieren Sie die Bissgabel in der flexiblen kalten Rührschüssel, die kaltes Wasser enthält, um die Mischung zu härten.

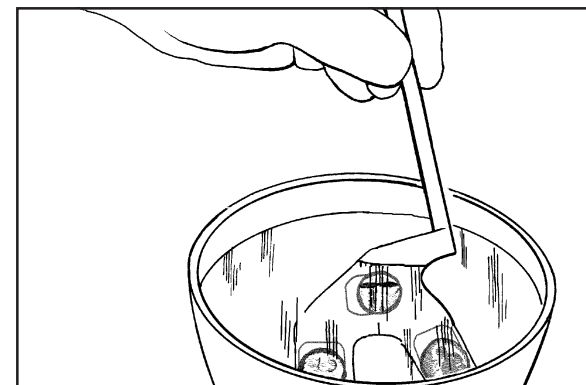
4


Anweisungen für die Bissgabel

5

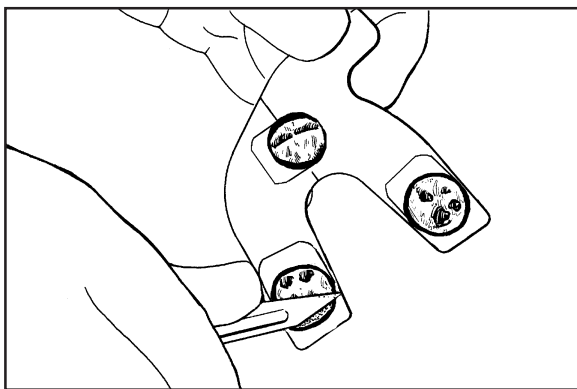

Schaben Sie die überschüssige Mischung ab, sodass nicht mehr als 1mm tiefe Eindrücke der Scheitelspitzen und Inzisalkanten verbleiben. Schneiden Sie auch irgendwelche distale zahnlose Erweiterungsbereiche zurück, sodass nur ein kleiner Bereich des Kiefers mit dicht befestigter Gingiva verbleibt, um die Bissgabel im Mund zu stützen. Entfernen Sie alle losen Partikel der Mischung mit einer weichen Zahnbürste oder Druckluft.

6

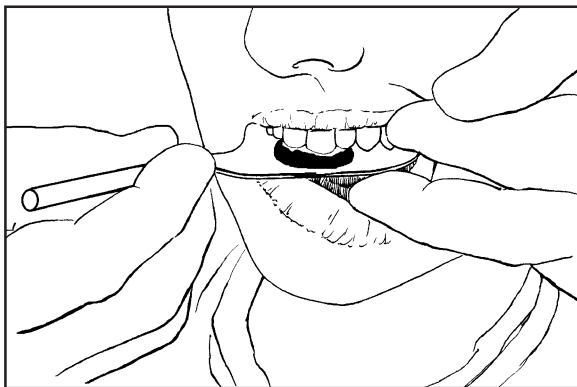

Platzieren Sie die Bissgabel-Registrierung gegen die maxillaren Zähne des Patienten und lassen Sie den Patienten die mandibulären Zähne unter Verwendung des Unterkiefers fest in die ursprünglichen Vertiefungen schließen, um die Bissgabel zu stützen.