



MPanadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Kalifornien 92324, USA
Tel.: (909) 783-1841




Diese Anweisungen gelten
für das folgende Element:
REF 4094

Denar-Adapter Anweisungen



Bringen Sie den Denar-Adapter am unteren Rahmen des Denar-Artikulators mit der Montageplattenschraube an.

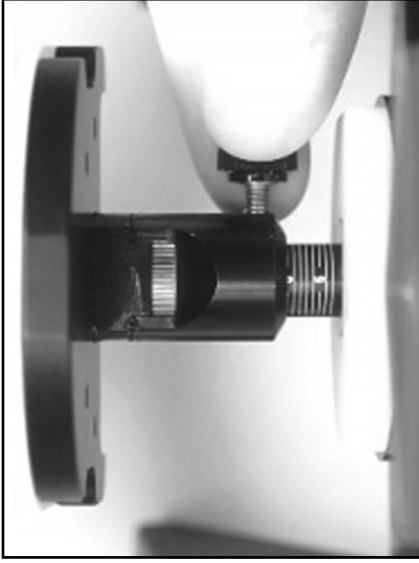

Aufgrund der geringen Höhe des Denar-Artikulators, muss die Kois-Plattform ganz bis nach unten angepasst werden (-6 mm), vor dem Montieren des Abdruck



Indexieren Sie die Panadent Kois-Plattform auf das Denar-Adapter am Artikulator. Folgen Sie jetzt dem Montageverfahren im Kois Handbuch.



MPanadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Kalifornien 92324, USA
Tel.: (909) 783-1841




Diese Anweisungen gelten
für das folgende Element:
REF 4094



Denar-Adapter Anweisungen



Bringen Sie den Denar-Adapter am unteren Rahmen des Denar-Artikulators mit der Montageplattenschraube an.

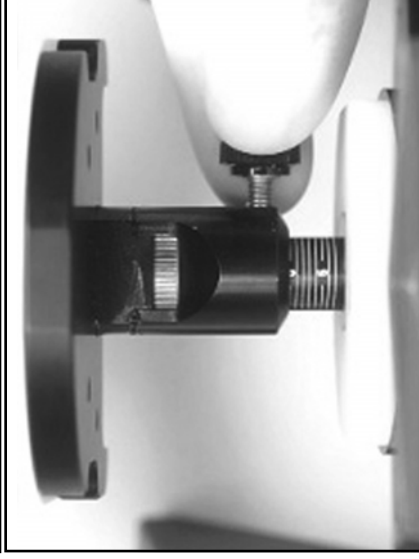

Aufgrund der geringen Höhe des Denar-Artikulators, muss die Kois-Plattform ganz bis nach unten angepasst werden (-6 mm), vor dem Montieren des Abdrucks.



Indexieren Sie die Panadent Kois-Plattform auf das Denar-Adapter am Artikulator. Folgen Sie jetzt dem Montageverfahren im Kois Handbuch.

