


Anweisungen zum zahnlosen Ausleger




(1.) Entfernen Sie die untere Zahnprothese des Patienten. Die obere Zahnprothese im Mund des Patienten belassen. Befestigen Sie die Kunststoffkralle und Ausleger an der Querstange. Platzieren Sie den höchsten Discluder. Die Ausleger 6-7 Zoll (abhängig von der Gesichtsbreite) in gleicher Distanz von der Mittellinie der Querstange bringen.



(2.) Überzeugen Sie sich, dass die unterere Zahnprothese des Patienten auf leichte Weise in die Kralle passt; wenn nicht, modifizieren Sie die Kralle.

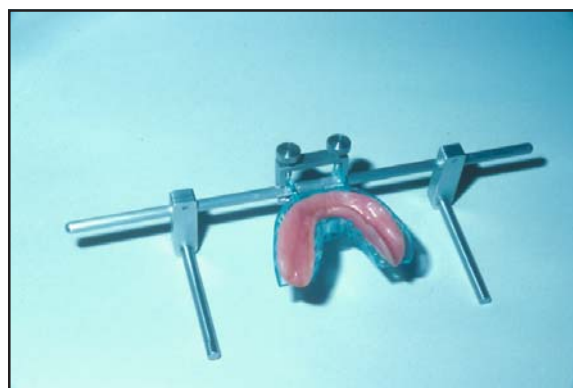


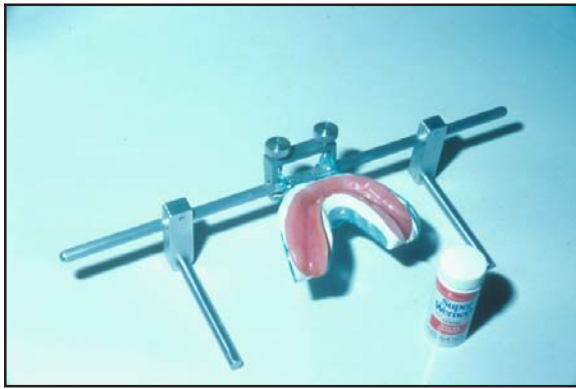

(3.) Befestigen Sie die untere Zahnprothese mit schnell härtendem Gips an der Kralle. Schieben Sie beide Gummibänder am Ausleger nur auf einer Seite des Patienten und lassen die losen Enden frei hängen. Befeuchten Sie die Zahnprothese und bestreuen Sie sie mit Zahnprothesenpulver.



(4.) Platzieren Sie die unterere Zahnprothese mit der befestigten Querstange im Mund des Patienten und lassen Sie den Patienten auf zwei Watterollen beißen (bilateral platziert). Während der Patient fest auf die Watterollen beißt, spannen Sie die Gummibänder vom Ausleger auf einer Seite unter dem Unterkiefer und befestigen sie am Ausleger auf der anderen Seite des Patienten (ein Band in der Nähe vom Kinn, das andere Band in der Nähe der Kehle). Entfernen Sie die maxillare Zahnprothese und lassen den Discluder der Kralle sich gegen den vorderen zahnlosen Kiefer schieben.

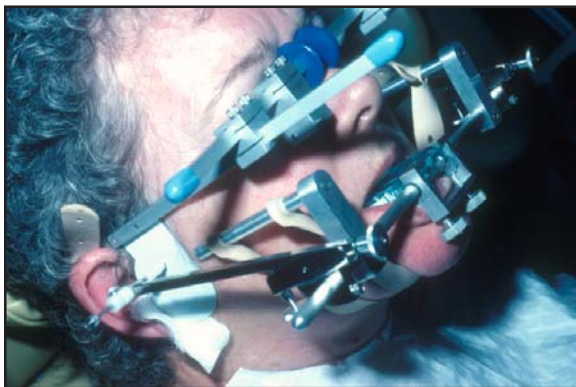

(5.) Platzieren Sie den maxillaren Kopffrahmen, um die Achse zu lokalisieren und die Scharnierachse in der normalen Weise zu registrieren, dann registrieren Sie die Vorwärts- und Seitwärts-Bennett-Bewegung. Entfernen Sie den Kopffrahmen und markieren Sie die Scharnierachse auf der Haut. Setzen Sie die obere Zahnprothese wieder ein und lassen Sie den Patienten auf zwei Watterollen beißen. Während der Patient auf die Watterollen beißt, lösen Sie die Gummibänder zuerst auf einer Seite des Patienten und entfernen dann die unterere Zahnprothesen-Krallen-Querstange.