
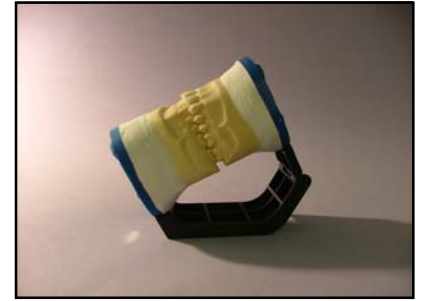


PAL™ - Kunststoffartikulator Lite Anweisungen

Einrichten einer funktionellen Verbindung zwischen Einweg- und halbeinstellbaren Artikulatoren!

- Anatomische Drehachse (gleich wie der Vollgrößen-Artikulator)
- Horizontale und vertikale Führungen
- Integrierter Aufnahmeständer

- Neu Konstruierte Montageplatte
Ein Index für PAL...
Ein anderer für den Artikulator
- Einweg- oder semi-wiederverwendbar
- 100 öffnen, um die Rahmen zu trennen

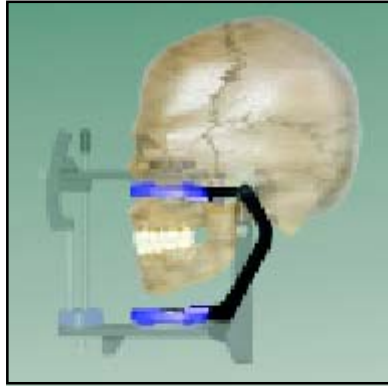

Anweisungen:



1. Die Studienabdrücke auf der magnetischen Montageplatte auf dem Panadent Vollgrößen-Artikulator (Modell PCH, PSH) unter Verwendung des Kois Dento-Facial Analysators oder des traditionellen Pana-Mount-Gesichtsbogens und einer Interokklusalregistrierung montieren.



2. Entfernen Sie die an den Studienabdrücken befestigten Montageplatten vom Panadent Vollgrößen-Artikulator. Befestigen Sie den neuen Panadent PAL-Artikulator in der Aufnahmeöffnung, die sich hinter der magnetischen Kunststoffmontageplatte befindet.



3. Nach dem Ausführen von Laborverfahren zur Erstellung von Restaurierungen kann der PAL-Artikulator von den Studienabdrücken durch Drücken des auf der Unterseite der magnetischen Kunststoffmontageplatte lokalisierten Freigabeknopfes abgenommen werden.



4. Die Studienabdrücke können jetzt wieder auf dem Panadent Vollgrößen-Artikulator platziert werden, sodass die Restaurierungen bezüglich der Qualität unter Verwendung der Anleitung des kurvenförmigen Bewegungsanalogs kontrolliert werden können und führen Sie jegliche abschließenden Einstellungen aus, falls erforderlich.