

Proxi-Fit™ Anweisungen (Zur Markierung von Kontakten in den Zahnzwischenräumen)



1. Nehmen Sie einen Streifen von Prüfbändern mit der sterilen Pinzette oder Wattepinzette auf. Schneiden Sie die gewünschte Anzahl an Prüfbändern (gewöhnlich drei) ab, um ein individuelles Paket zu erstellen.



2. Halten Sie den gedruckten Papierträger des Bandpaketes mit der linken Hand. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand, biegen Sie Ende des Bandpaketes fest über den linken Zeigefinger.



3. Biegen Sie die Klarsichtfolie und halten Sie sie gegen den gedruckten Papierträger zwischen dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand.




4. Kneifen Sie die Klarschutzfolie und das Papierträgerblatt mit den Daumen und Zeigefingern von beiden Händen an der Basis der Bänder, um die Schutzfolien abzuknicken und die Bänder aufrecht stehen zu lassen.




5. Wenn sie geknickt sind, bilden das Papierträgerblatt und der gedruckte Papierträger einen bequemen Stand für das Bandpaket.



6. Fassen Sie den Pinzettengriff mit allen vier Fingern der rechten Hand an und bringen Sie beide Handgelenke zusammen, um sie gegeneinander abzustützen. Drücken Sie den Knopf mit dem rechten Daumen, um die Schenkel der Pinzette zu öffnen.

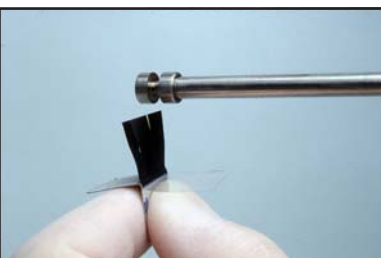

7. Mit offenen Pinzettenschenkeln, bringen Sie die Schenkel über das freie Ende des seitlichsten Prüfbandes.

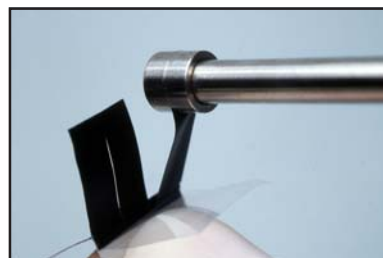

8. Lösen Sie langsam den Daumen vom Knopf, um das Prüfband vollständig fest zu fassen.



9. Mit einem kleinen schnellen Ruck ziehen Sie das Band in Richtung zu sich, um das Band vom Haftklebstoff im Paketband zu lösen.



 3060: Wenn es mehr als ein Mal verwendet wird, kann eine Patientenquerkontaminierung auftreten.