

Diese Anweisung gilt für folgendes Element:

Montageplatten-Abstandhalter Anweisungen

REF 2479

1

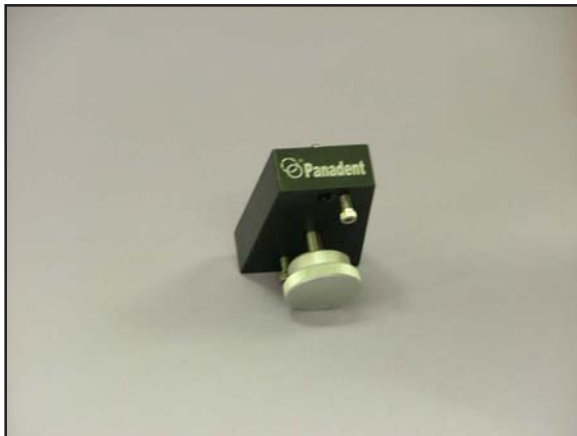



Bild des vollständigen mandibulären Montageplatten-Abstandhalters.

2




Standardmontageplattenschraube anhand Herausschrauben durch den unteren Rahmen des Artikulators entfernen.

3

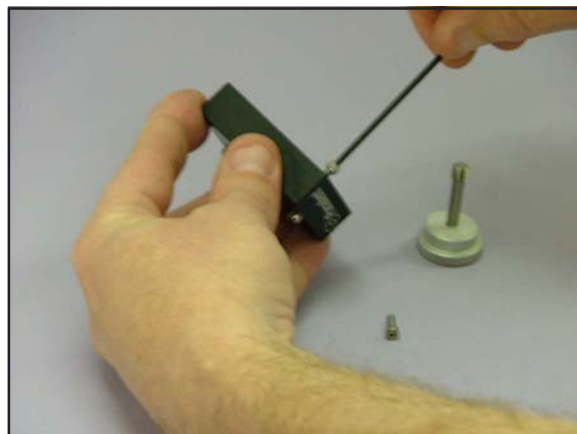


Erweiterte Montageplattenschraube und kleine Befestigungsschrauben vom Abstandhalter entfernen.

4

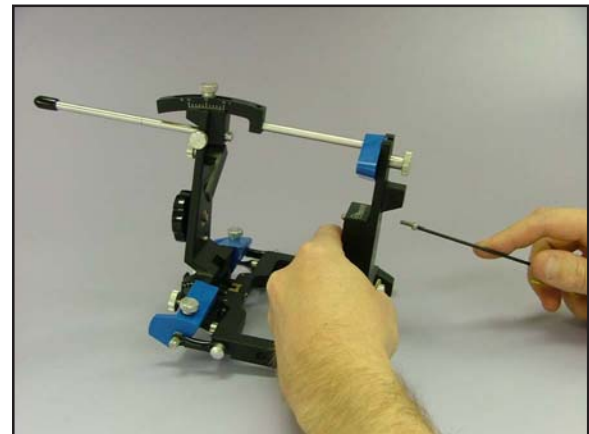

Abstandhalter auf dem unteren Rahmen des Artikulators mit kleinen Befestigungsschrauben befestigen.

5

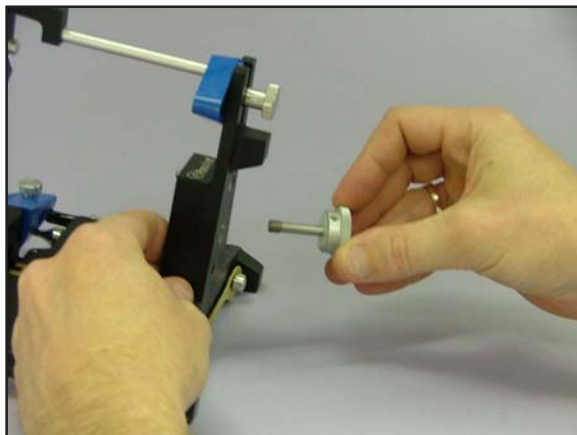

Erweiterte Montageplattenschraube durch Einführen durch den Rahmen des Artikulators und Abstandhalters platzieren.

6



Bild zeigt die vollständige Montageplatten-Abstandhalterbaugruppe auf dem Artikulator.