


Rimuovere dall'articolatore la tavola incisale di plastica.




Installare la tavola incisale regolabile e fissarla con la vite a testa zigrinata più piccola.




Regolare la guida incisale secondo le proprie necessità e fissarla con la vite a testa zigrinata più grande.

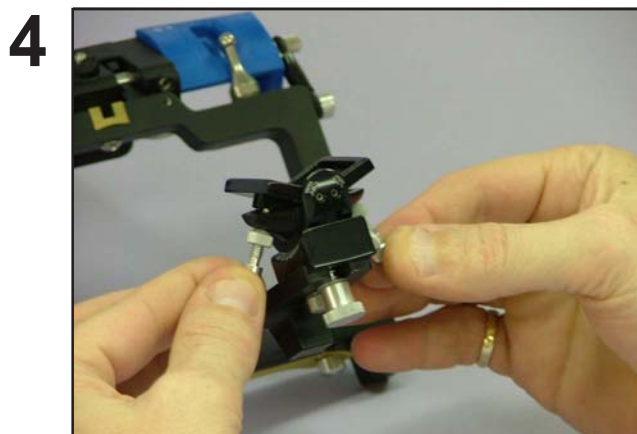

Regolare la guida laterale secondo le proprie necessità con le viti di regolazione laterale.

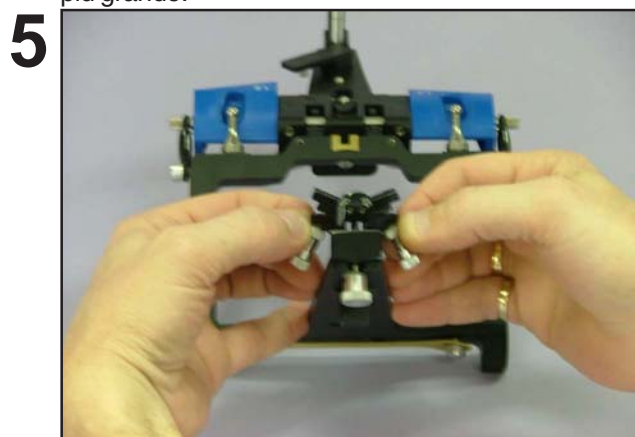

Bloccare la guida laterale avvitando i dadi di fissaggio laterali.

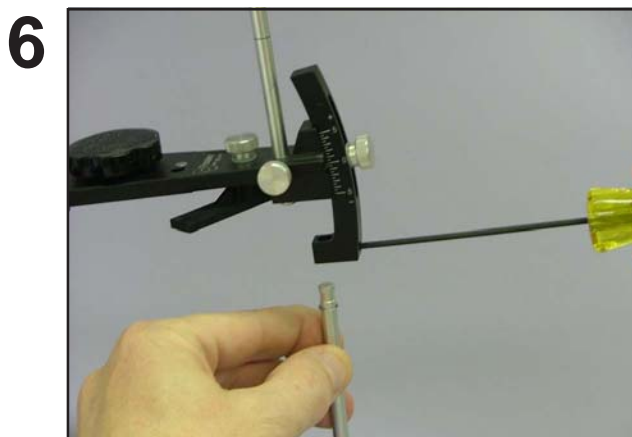

Per l'articolatore PCH (vd. foto), installare il nuovo perno incisale a punta piatta facendo uso di un cacciavite a punta esagonale. Per gli articolatori SH o PSH, capovolgere il perno incisale dirigendo la punta piatta verso il basso.