

Istruzioni per la colonna di verifica dell'articolatore

1



Fissare la colonna di verifica alla branca inferiore dell'articolatore con la vite della piastra di montaggio. Se si utilizza una colonna di verifica di tipo magnetico, collocarla sulla piastra di montaggio magnetica.



2

Fissare la piastra di montaggio standard alla branca superiore dell'articolatore con la vite della piastra di montaggio. Se si utilizza una piastra di montaggio magnetica, collocare la piastra di avanzamento in plastica sulla piastra di montaggio magnetica.




3

4



Collocare l'anello contenitore per il gesso in PCV sulla parte superiore della colonna di verifica.

5

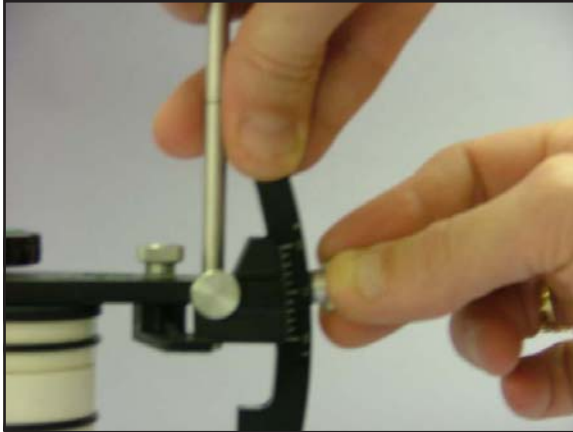


Impostare il perno incisale sullo zero e assicurarsi che il fissaggio centrico sia correttamente inserito.

6




Nebulizzare la superficie superiore della colonna di verifica e le branche dell'articolatore con silicone lubrificante spray in modo da impedire che il gesso si attacchi.

7

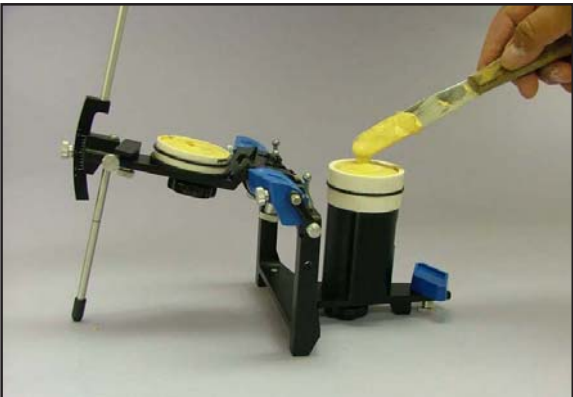

Collocare sulla piastra di montaggio la pietra ad alto grado di durezza e riempire l'interno dell'anello contenitore per il gesso fino al riempimento della colonna di verifica.

Ruotare la branca superiore dell'articolatore fino a poggiare il perno incisale sulla tavola incisale e a far coincidere i due elementi riempiti dal gesso.

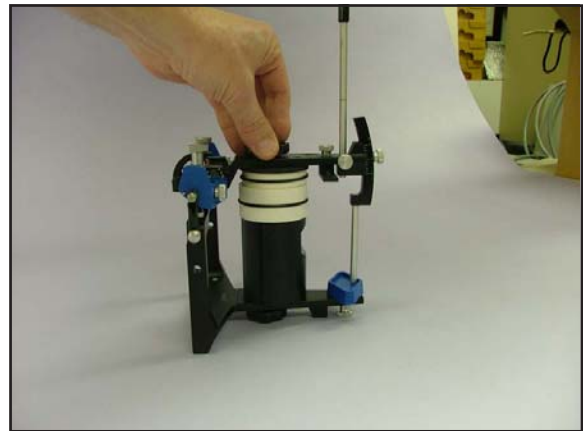


8

Dopo che il gesso si è indurito, rilasciare il fissaggio di centrica e sollevare dalla colonna la branca superiore dell'articolatore e la piastra per la pietra.



9

Rimuovere l'anello contenitore per il gesso in PVC o il calco dentale dalla colonna di verifica o dalla piastra di avanzamento.

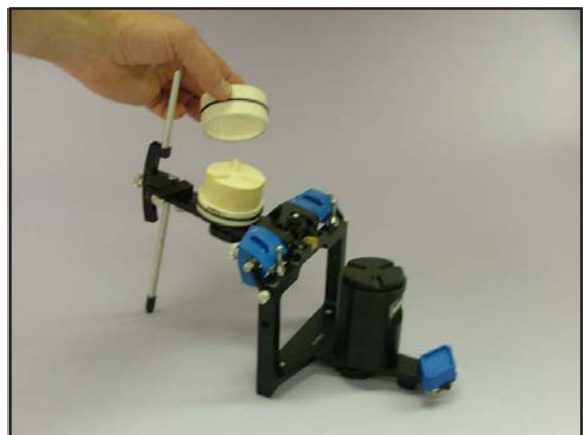


10

Rimuovere dall'articolatore la colonna di verifica e la pietra della piastra di montaggio. Rimuovere il materiale in eccesso dai margini del calco e pulire la colonna. Per eventuali riferimenti futuri, è possibile segnare il numero seriale dell'articolatore e la data corrente sulla base del calco.



11

12

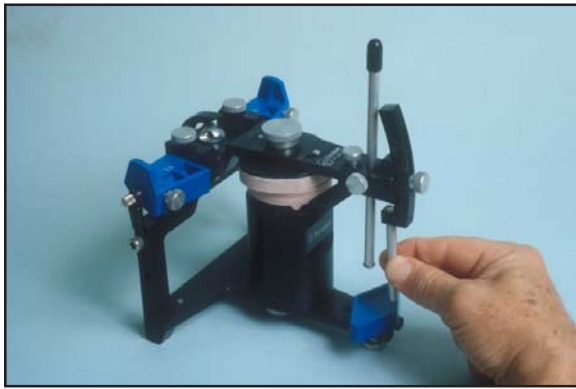

Collocare nuovamente sull'articolatore la colonna e la pietra della piastra di montaggio; ruotare la branca superiore dell'articolatore per far poggiare la base della pietra sulla colonna.

13



Verificare l'aderenza tra il calco e la colonna. La colonna e il calco possono essere collocati su altri articolatori (modello "P") per verificare che siano intercambiabili. In caso di discrepanze, contattare l'assistenza clienti Panadent.