



Istruzioni del supporto per la forchetta magnetica

1

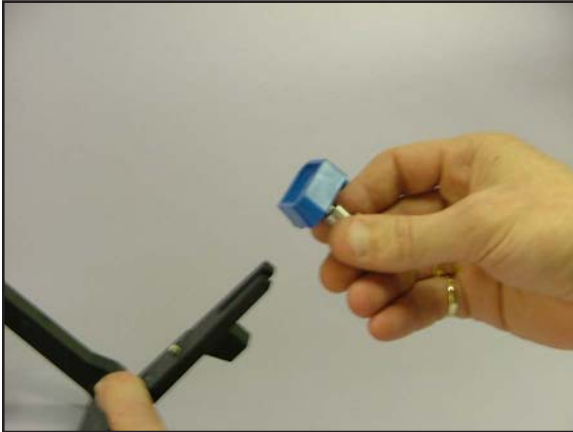


Rimuovere dall'articolatore la tavola incisale di plastica.

2

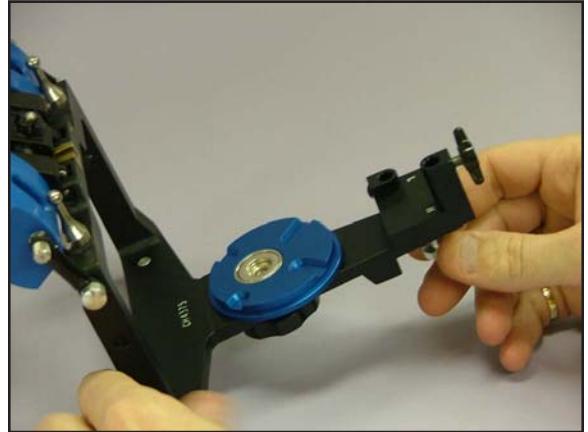


Inserire lo strumento di montaggio all'interno della fessura presente sulla tavola incisale e bloccarla con la vite a testa zigrinata.

3

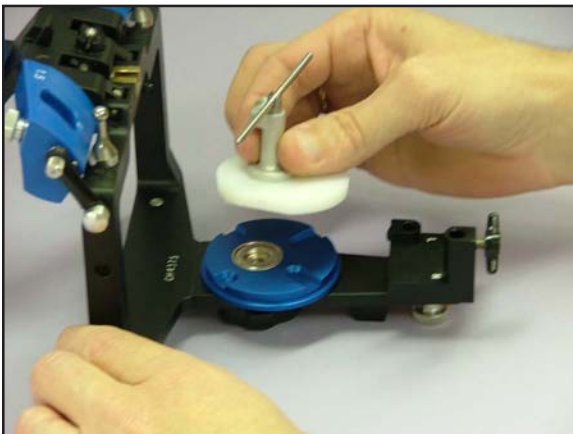


Collocare il supporto per la forchetta magnetica sulla piastra di montaggio magnetica presente sulla branca inferiore dell'articolatore.

4

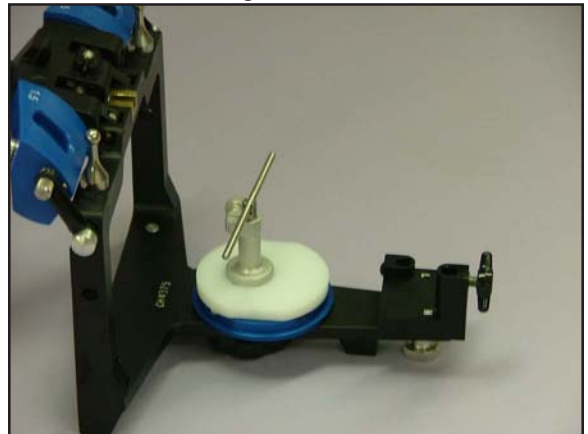

Verificare che la barra di sostegno dei calchi sia correttamente inserita.

5

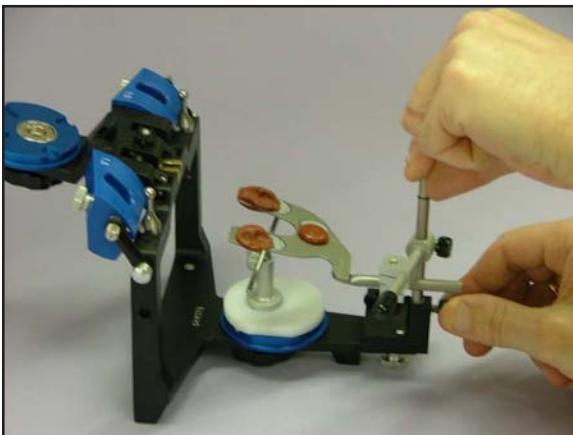

Collocare la forchetta sullo strumento di montaggio, quindi bloccarla.

6



Tirare delicatamente verso l'alto la barra di sostegno dei calchi fino al contatto con la forchetta, quindi bloccarla con una vite a testa zigrinata. Montare il calco desiderato come di consueto.