



■ Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

Le seguenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:


REF 4405

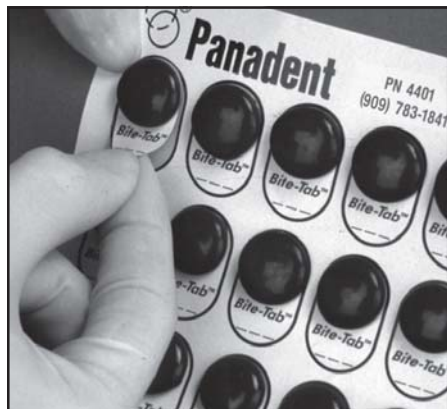


1. Piegare la carta che circonda la compressa **Bite-Tab** ed eliminarla separandola dalla compressa dopo aver sollevato la parte stampata. (Non toccare la parte adesiva nella parte inferiore della compressa).

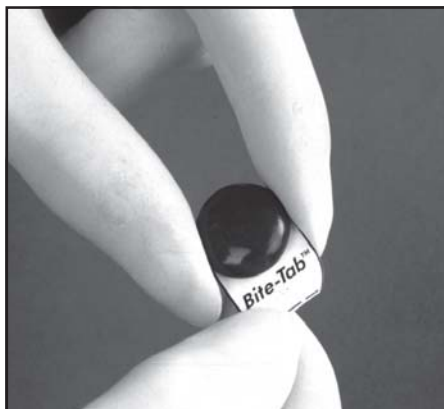

2. Ricordare di maneggiare la compressa **Bite-Tab** tenendola per i lati. (Piegarla la striscia adesiva lungo la linea tratteggiata per rimuovere più facilmente la striscia **Bite-Tab** dalla forchetta dopo averla utilizzata.)

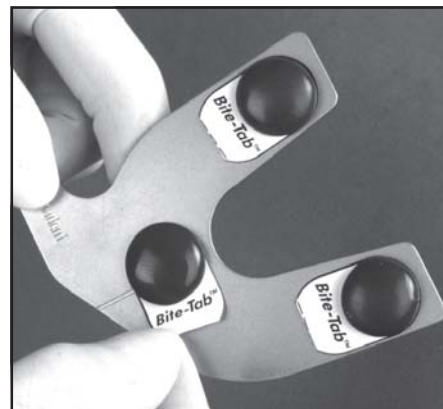


3. Collocare una compressa **Bite-Tab** sulle seguenti aree: molare sinistro, molare destro e aree incisali. Le compresse devono essere applicate su entrambi i lati di una forchetta pulita e asciutta. (Attenzione: non sovrapporre la forchetta al segno che individua la linea mediana).

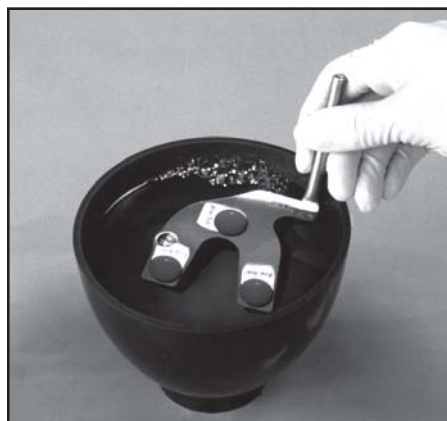


4. Tenere la forchetta immersa in acqua dolce calda (125°F / 40°C) per circa un minuto, così da ammorbidire la compressa **Bite-Tab**. (Non utilizzare bagni termostatici per ammorbidire il composto: i residui di cera e gli oli presenti nel macchinario potrebbero impedire l'adesione delle capsule **Bite-Tab** alla forchetta).




5. Per ottenere le impronte oclusali mascellari e mandibolari (profondità circa 1 mm), fare mordere delicatamente la compressa **Bite-Tab** al paziente. (Evitare accuratamente i contatti oclusali con la forchetta). Rimuovere la forchetta e far raffreddare la compressa **Bite-Tab** con aria compressa o acqua fredda.

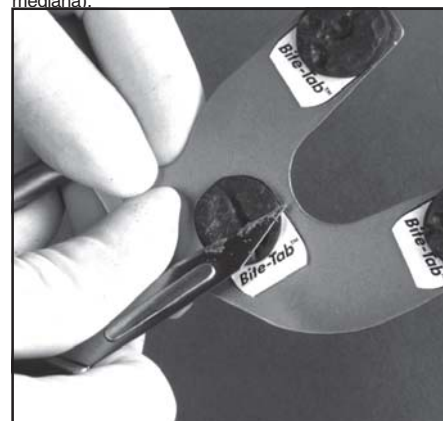


6. Eliminare con uno strumento affilato il composto in eccesso, prestando attenzione affinché si preservino impronte di denti o creste profonde almeno 1 mm.

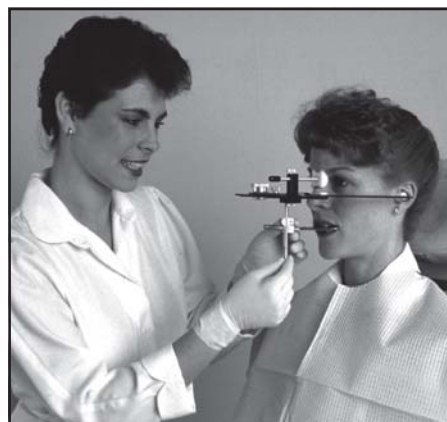

7. Inserire nuovamente la forchetta nella bocca del paziente e collegarla all'arco facciale secondo le metodologie già descritte.

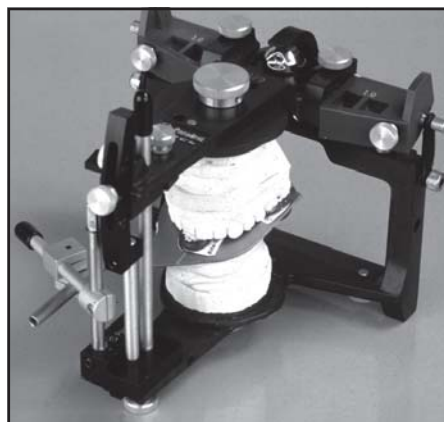


8. Montare il calco mascellare sull'articolatore con la forchetta già installata. (L'immagine mostra il gruppo forchetta rimovibile e il relativo strumento di montaggio).

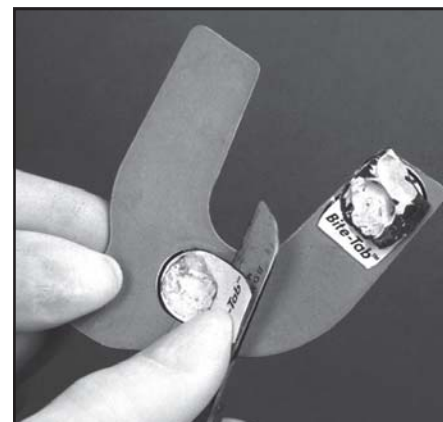

9. Immergere la forchetta in acqua calda per ammorbidirle leggermente e poterle rimuovere con maggiore semplicità. Utilizzare un cottellino da laboratorio a punta arrotondata per rimuovere le strisce adesive.



 4405: Non utilizzare più di una volta al fine di evitare la contaminazione crociata tra i pazienti.