

Istruzioni per la sostituzione del fissaggio della centrica:

Elementi necessari per la sostituzione del fissaggio della centrica:

- 1 #2023 Fissaggio della centrica
- 1 #9702 Molla della centrica
- 1 #9906 Cacciavite a testa esagonale o chiave a brugola da 1,59 mm
- 1 #9904 Cacciavite a testa esagonale per articolatori o chiave a brugola da 2,38 mm

Rimozione del fissaggio della centrica :

Allentare le viti a testa zigrinata presenti sugli analoghi blu per rimuovere i perni Dyna-Link. Sbloccare il fissaggio della centrica e separare la branca superiore dell'articolatore da quella inferiore. Tenendo l'articolatore, allentare e rimuovere la vite del canale centrico facendo uso di un cacciavite a testa esagonale in dotazione. Rimuovere il canale centrico in ottone. Utilizzando un cacciavite a testa esagonale da 1,59 mm, allentare le viti di fissaggio dei perni di movimento del fissaggio della centrica. Far fuoriuscire i perni di movimento del fissaggio della centrica spingendoli dalla fessura del canale centrico. Rimuovere il fissaggio della centrica. NB: prestare attenzione a non allentare la molla del fissaggio della centrica

Installazione del fissaggio della centrica :

Collocare il nuovo fissaggio della centrica nella branca inferiore dell'articolatore. Spingere il perno di movimento verso l'alto fino al contatto con il fissaggio della centrica. Posizionare la molla nella sua collocazione presso il fissaggio della centrica e spingere il perno di rotazione. Avvitare le viti di fissaggio del perno di rotazione del fissaggio della centrica. Riposizionare la branca superiore dell'articolatore e regolare il canale centrico secondo necessità.