



Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841



Le presenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:
REF 4094



Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841




Le presenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:
REF 4094

Istruzioni dell'Adattatore Denar



Fissare l'adattatore Denar alla
branca inferiore dell'
articolatore Dentar facendo uso
della vite della piastra di montaggio.

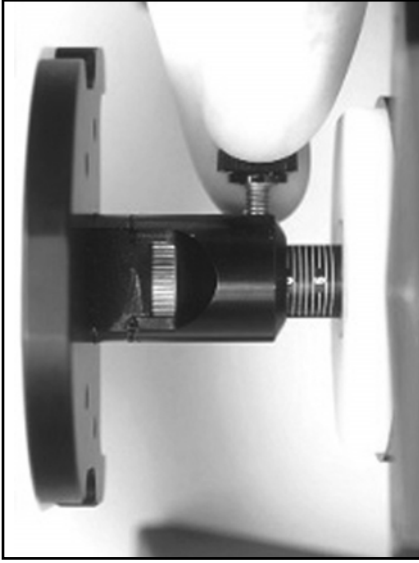


Considerata l'altezza ridotta
dell'articolatore Denar,
la Piattaforma Kois deve essere
abbassata completamente
(-6 mm)
prima di montare il calco.



Collocare la Piattaforma Panadent
Kois sull'adattatore
Denar presente sull'articolatore.
Seguire quindi le procedure
di montaggio indicate all'interno del Manuale
Kois.



Fissare l'adattatore Denar alla
branca inferiore dell'
articolatore Dentar facendo uso
della vite della piastra di montaggio.

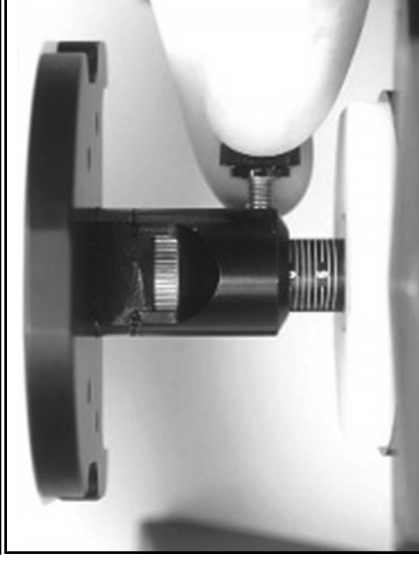

Considerata l'altezza ridotta
dell'articolatore Denar,
la Piattaforma Kois deve essere
abbassata completamente
(-6 mm)
prima di montare il calco.



Collocare la Piattaforma Panadent
Kois sull'adattatore
Denar presente sull'articolatore.
Seguire quindi le procedure
di montaggio indicate all'interno del Manuale
Kois.

