

Regolazione della vite della piastra di fissaggio

1. Rimuovere il pomolo a vite della piastra di montaggio svitandolo dalla branca dell'articolatore.



2. Allentare la vite di fissaggio del pomolo a vite facendo uso di un cacciavite a testa esagonale.



3. Con le dita, spingere l'asse della vite all'interno del pomolo a vite.



4. Per fissare il nuovo assetto dell'asse, avvitare la vite di fissaggio del pomolo a vite con un cacciavite a testa esagonale. Ricollocare nella posizione originale il pomolo a vite.

