

Istruzioni del sistema Magna-Split II



Fissare la piastra di montaggio metallica sull'articolatore facendo uso delle apposite viti.




Fissare il magnete sulla piastra di fissaggio con la vite dedicata.



Collocare la base in plastica sulla piastra di montaggio magnetica in metallo.



Collocare del gesso sulla piastra in plastica e sul calco di studio per montare i modelli come di consueto.

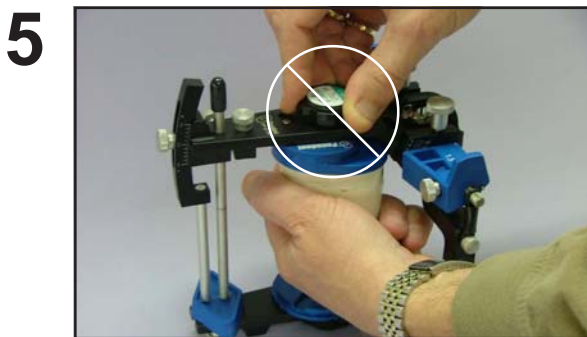

Per non perdere il gruppo magnete, non tentare di rimuovere i calchi svitando la manopola: l'alloggio del magnete e il magnete stesso potrebbero cadere o rimanere agganciati ai calchi montati.



Per evitare che i calchi si separino dalla piastra di montaggio, tenere saldamente i calchi e la piastra con il pollice e le dita. Poggiare su un lato il gruppo per il montaggio del calco per separare il calco dal magnete della piastra di montaggio. (Non tirare i calchi).

Verificare che il magnete sia ancora presente sull'articolatore: senza un magnete, le piastre di trasferimento per il gesso non potranno unirsi.

