



## Istruzioni del gruppo spaziatore della piastra di fissaggio

**1**

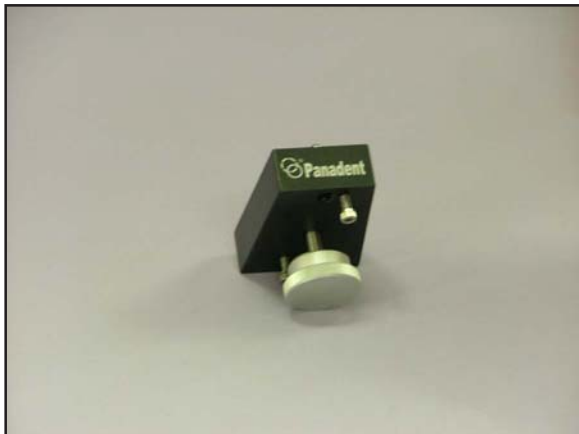


L'immagine mostra il gruppo spaziatore della piastra di montaggio mandibolare.

**2**

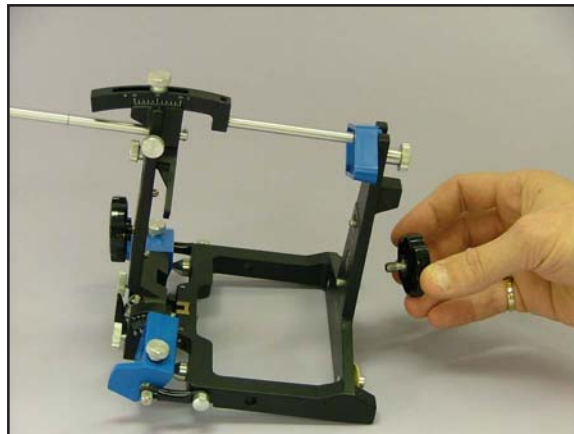


Rimuovere la vite della piastra di montaggio standard svitandola dalla branca inferiore dell'articolatore.

**3**

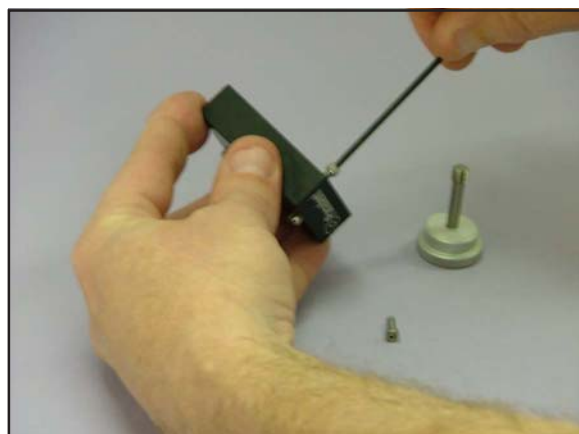


Rimuovere la vite più lunga della piastra di montaggio e le piccole viti di fissaggio del gruppo spaziatore.

**4**

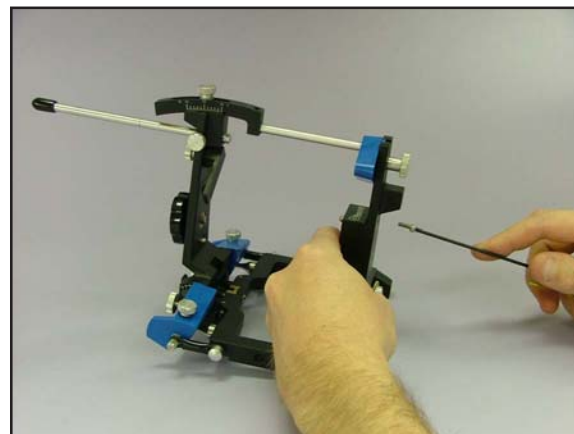


Fissare il gruppo spaziatore sulla branca inferiore dell'articolatore con le viti di fissaggio più piccole.

**5**

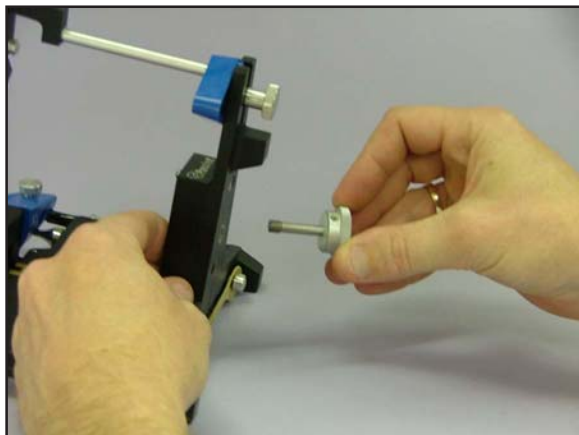

Inserire nuovamente la vite più lunga della piastra di fissaggio facendola passare attraverso la branca dell'articolatore e il gruppo spaziatore.

**6**

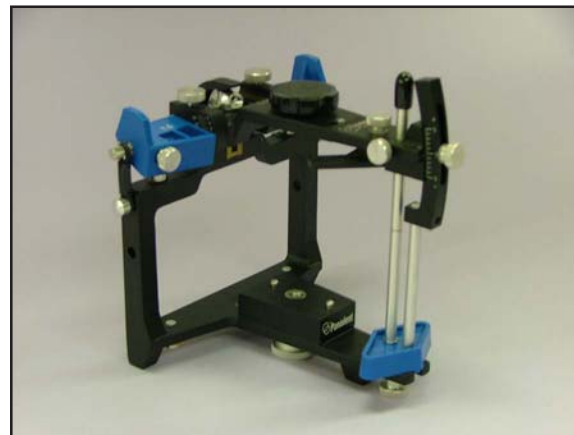

L'immagine mostra il gruppo spaziatore della piastra di fissaggio installato sull'articolatore.