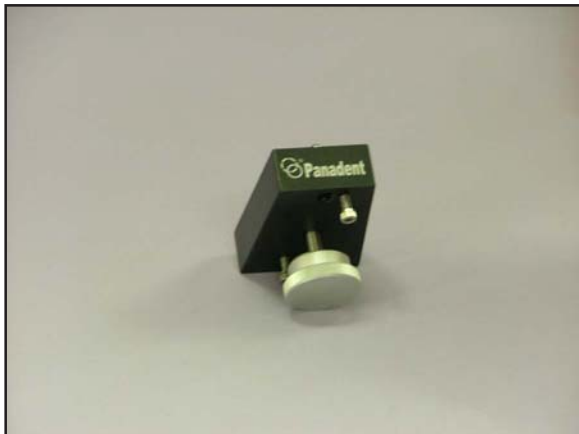
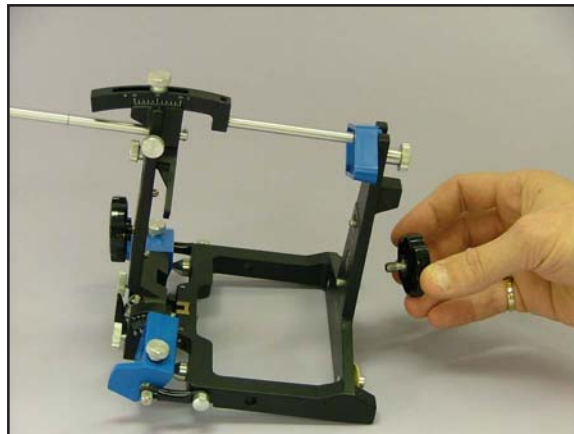


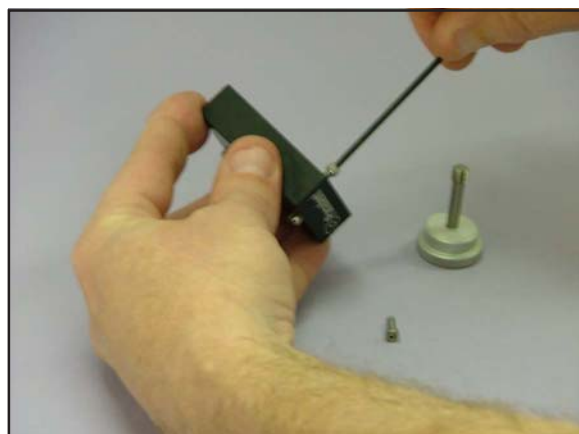
Istruzioni del gruppo spaziatore della piastra di fissaggio

1

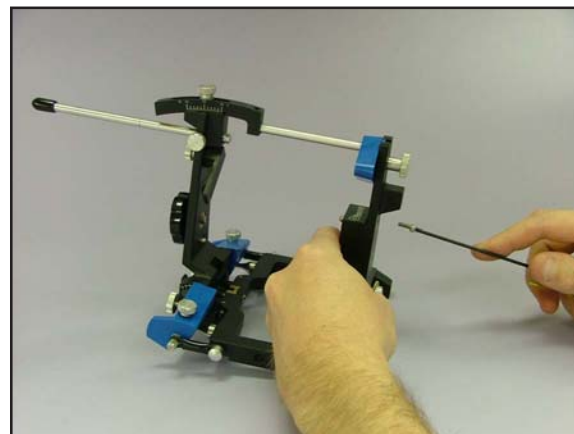
L'immagine mostra il gruppo spaziatore della piastra di montaggio mandibolare.

2

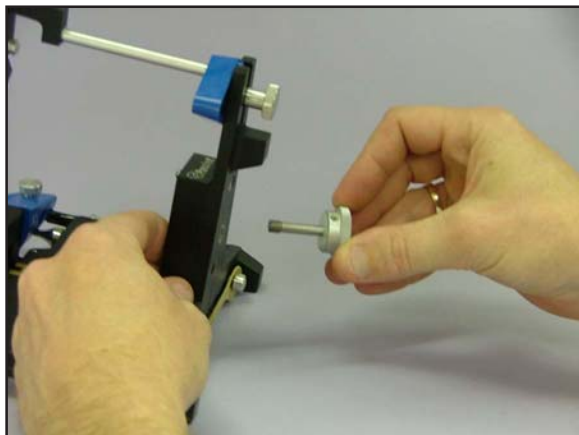
Rimuovere la vite della piastra di montaggio standard svitandola dalla branca inferiore dell'articolatore.

3

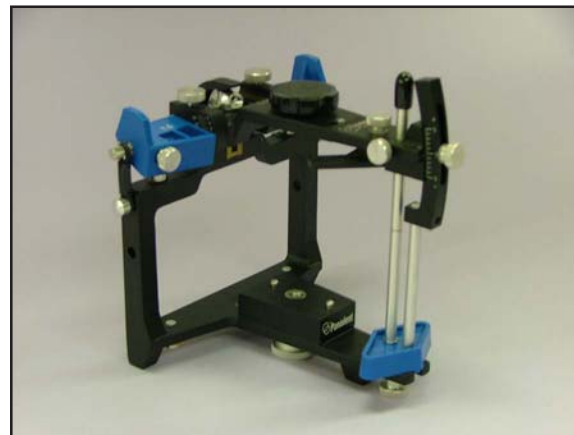
Rimuovere la vite più lunga della piastra di montaggio e le piccole viti di fissaggio del gruppo spaziatore.

4

Fissare il gruppo spaziatore sulla branca inferiore dell'articolatore con le viti di fissaggio più piccole.

5

Inserire nuovamente la vite più lunga della piastra di fissaggio facendola passare attraverso la branca dell'articolatore e il gruppo spaziatore.

6

L'immagine mostra il gruppo spaziatore della piastra di fissaggio installato sull'articolatore.