


Remover la mesa incisal plástica del articulador.




Colocar la mesa incisal ajustable y asegurarla en su lugar con el tornillo pequeño.

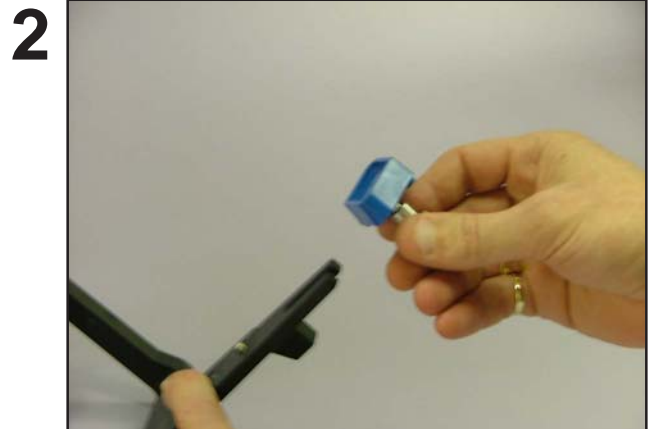


Ajustar la guía incisal deseada y asegurarla en su lugar con el tornillo grande.



Ajustar la guía lateral deseada con los tornillos de ajuste laterales.

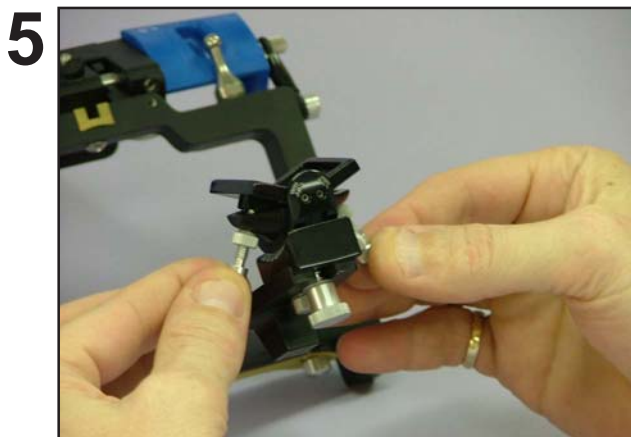

Asegurar la guía lateral apretando las tuercas laterales de seguridad.

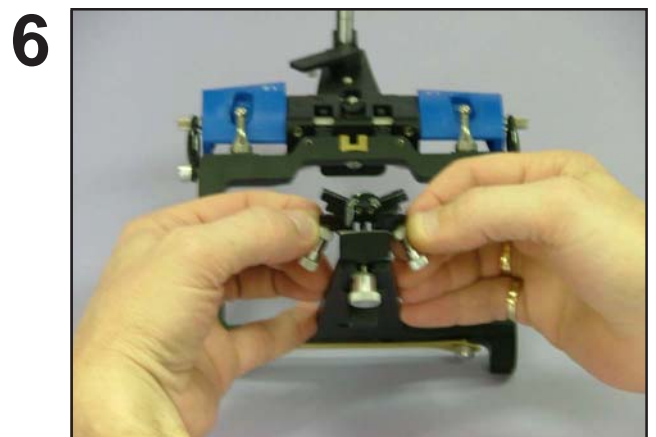

Para el articulador PCH (mostrado), colocar el vástago incisal de punta plana nuevo con la llave inglesa. Para los articuladores SH o PSH invertir el vástago incisal con la punta plana hacia abajo.