



Corporación Panadent

580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA

Tel: (909) 783-1841

# Instrucciones Básico Articulador Modular :

INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

INSTRUCCIONES ARCO FACIAL (OÍDO-NASIÓN)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MOLDE MAXILAR

INSTRUCCIONES REGISTRO INTEROCLUSAL

- Relación Céntrica
- Protrusivo
- Lateral Izquierdo
- Lateral Derecho


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MOLDE MANDIBULAR

AJUSTES AL ARTICULADOR (Protrusivo)

FUNCIONES DEL ARTICULADOR

INSTRUCCIONES PARA EL MODELO MAGNA-SPLIT II

## COMPONENTES DEL SISTEMA BÁSICO

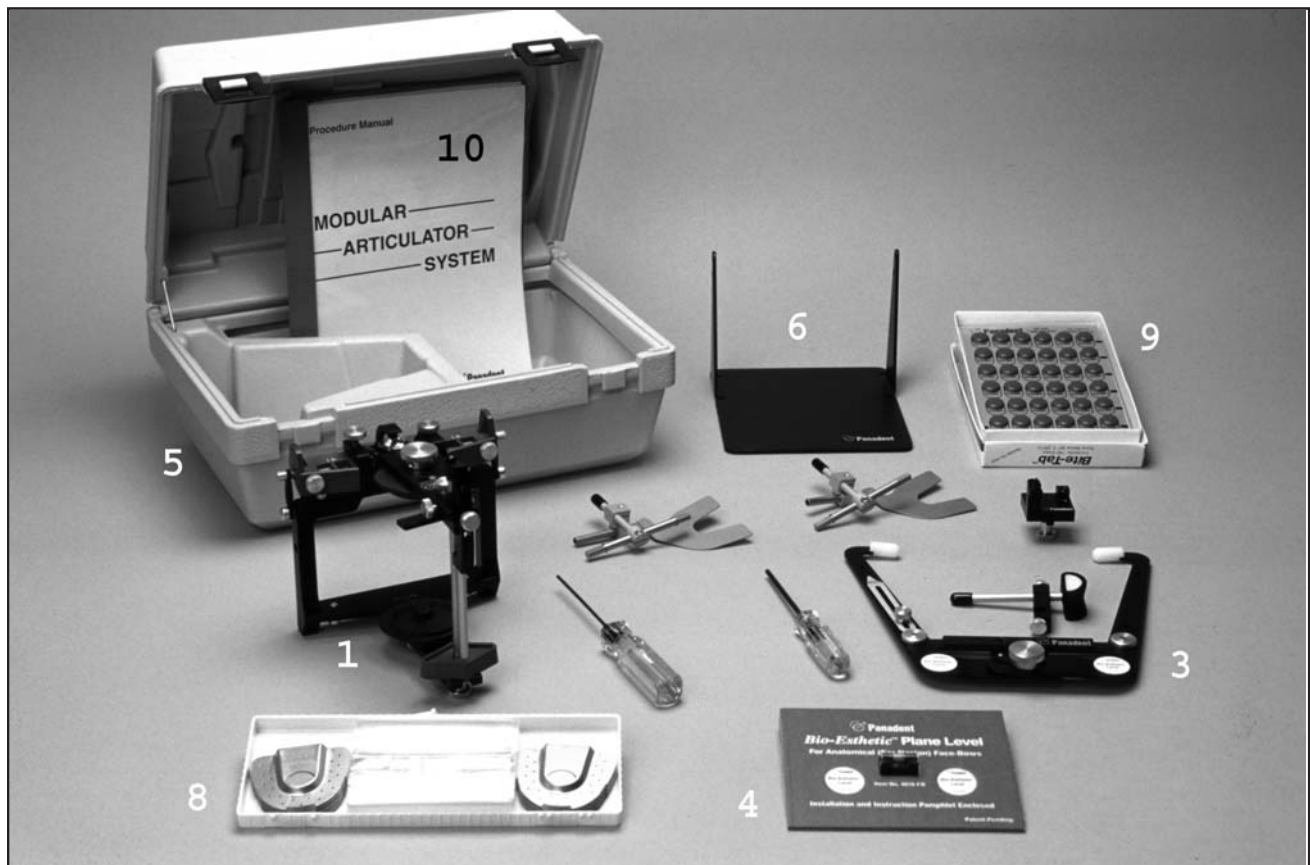

1. Articulador (Modelo PCH)
2. Patas de Apoyo del Articulador (no se muestran)
3. Arco facial **Pana-Mount**™
4. Calibrador **Bio-Esthetic**
5. Estuche Plástico Amoldado
6. Pedestal para Montaje Mandibular
7. Sistema Magna-Split II (no se muestra)
8. Placas para Registro **Bite-Tray**™ (20)
9. Discos **Bite-Tab**™
10. Manual Básico de Instrucciones
11. Aerosol Lubricante Pana-Lube (no se muestra)

## COMPONENTES DEL ARCO FACIAL :



1. Arco Facial **Pana-Mount** (Ensamble del Bastidor)
2. Aditamento para Montaje
3. Relator de Nación (22 mm)
4. Ensamble de la Horquilla de Mordida y Vástagos (2 de cada uno)
5. Llave Hexagonal