



1. Doblar hacia atrás la hoja y desprender la tira de *Bite-Tab* levantando la orilla

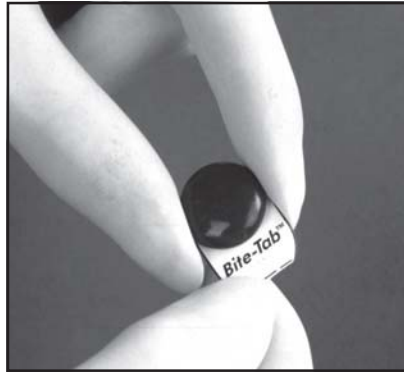

2. Sostener *Bite-Tab* por las orillas de la tira. (Doblar hacia atrás la tira adhesiva por la línea punteada para fácil remoción de la tira

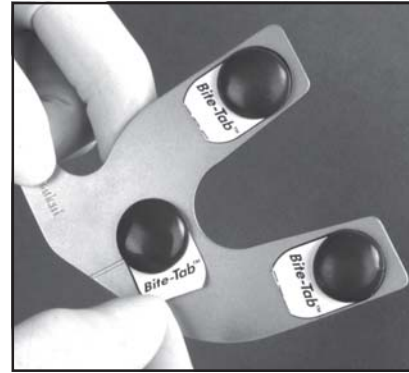


3. Presionar una tira de *Bite-Tab* en cada una de las siguientes áreas: molar izquierdo, molar derecho e incisivo en ambos lados de una horquilla




4. Mantener la horquilla de mordida en agua caliente (40°C) cerca de un minuto para ablandar el *Bite-Tab*. (No colocar la horquilla en baño de agua porque los residuos de




5. Hacer que el paciente muerda despacio en el compuesto *Bite-Tab* para obtener las marcas maxilares y mandibulares de aproximadamente 1 mm de profundidad. (Evitar contactos oclusales con la horquilla). Remover la horquilla y enfriar el

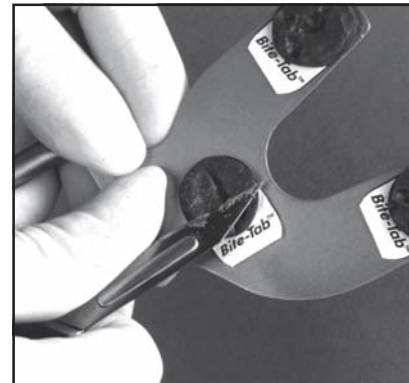


6. Eliminar el exceso del compuesto

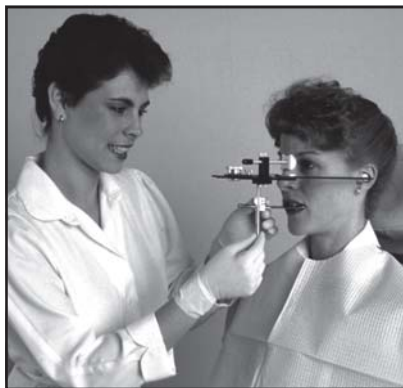

7. Reemplazar la horquilla de mordida de los dientes del paciente y unir el arco facial

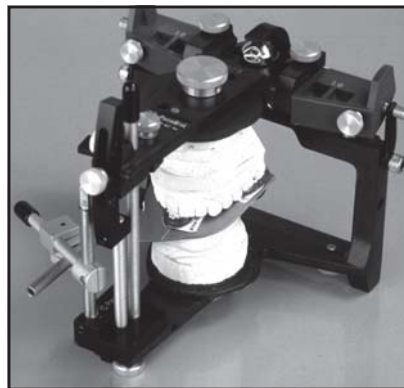

8. Montar el molde maxilar en el articulador con la horquilla de mordida. (Aquí se muestra un tipo de horquilla desprendible

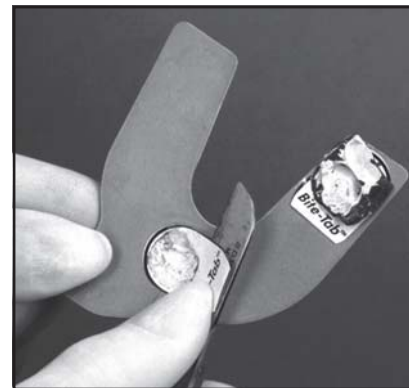

9. Para remover lengüetas usadas; remojar la horquilla de mordida en agua caliente para ablandar ligeramente el compuesto. Usar un cuchillo de laboratorio como para

  Si es reutilizado existe peligro de infección cruzada