



1. Doblar hacia atrás la hoja y desprender la tira de Bite-Tab levantando la orilla imprimida. (No toque el adhesivo bajo el lado de el compuesto.)

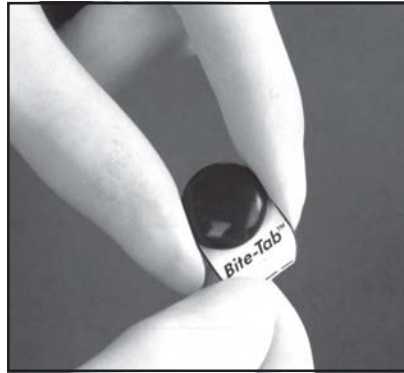

2. Sostener Bite-Tab por las orillas de la tira. (Doblar hacia atrás la tira adhesiva por la línea punteada para fácil remoción de la tira Bite-Tab de la horquilla despues de uso.)

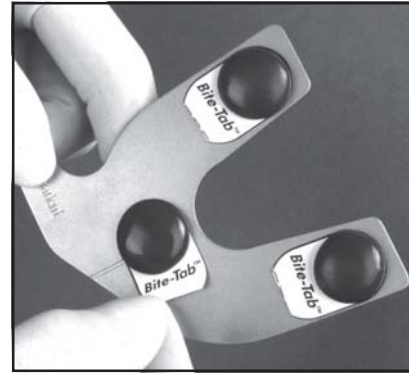


2. Presionar una tira de Bite-Tab en cada una de las siguientes áreas: molar izquierdo, molar derecho e incisivo en ambos lados de una horquilla limpia y seca. (No cubra la marca de la línea media en la horquilla.)




4. Mantener la horquilla de mordida en agua caliente (40°C) cerca de un minuto para ablandar el Bite-Tab. (No colocar la horquilla en baño de agua porque los residuos y aceites en el baño previenen la adhesión de el Bite-Tab en la horquilla.)




5. Hacer que el paciente muerda despacio en el compuesto Bite-Tab para obtener las marcas maxilares y mandibulares de aproximadamente 1mm de profundidad. (Evitar contactos oclusales con la horquilla). Remover la horquilla y enfriar el Bite-Tab con aire comprimido o agua fria.

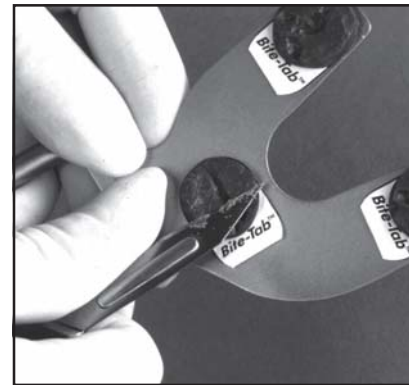


6. Eliminar el exceso del compuesto dejando huellas de diente o de canto con aproximadamente 1mm de profundidad.

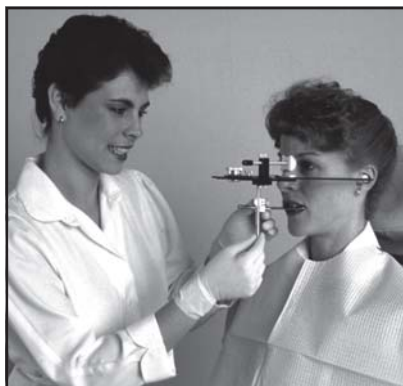

7. Reemplazar la horquilla de mordida entre los dientes del paciente y unir al arco facial de manera habitual.

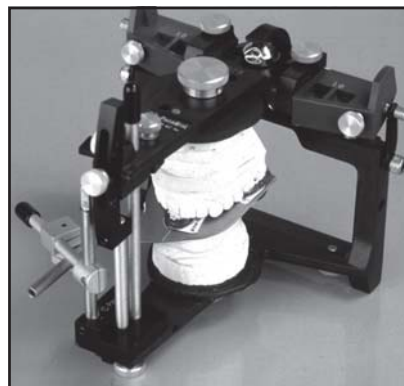

8. Montar el molde maxilar en el articulador con la horquilla de mordida. (Aquí se muestra un tipo de horquilla desprendible con el accesorio de montaje asociado).

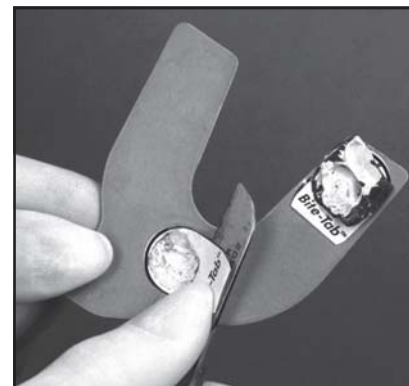

9. Para remover lengüetas usadas; remojar la horquilla de mordida en agua caliente para ablandar ligeramente el compuesto. Usar un cuchillo de laboratorio como para desprender las tiras adhesivas.