



Corporación Panadent

580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA

Tel: (909) 783-1841 • EEUU & Canadá (800) 368-9777

# Instrucciones para Reemplazar el Gancho Central

## Artículos necesarios para reemplazar el Gancho Central:

- 1 #2023 Gancho central
- 1 #9702 Resorte del gancho
- 1 #9906 Llave hexagonal o llave allen 1/16"
- 1 #9904 Llave hexagonal para Articulador o llave allen 3/32"

## Remoción del Gancho Central

Aflojar los tornillos de los análogos azules para remover los pernos Dyna-Links de los Análogos. Liberar el Gancho Central y remover el bastidor superior del articulador del bastidor inferior. Sostener el articulador y usando la llave hexagonal del articulador, aflojar y remover el tornillo de la ranura central. Remover la ranura central de bronce. Usando una llave hexagonal de 1/16", aflojar tornillos de los pernos de la bisagra del Gancho Central. Empujar los pernos de la bisagra hacia fuera a través de la ranura central. Remover el gancho central. Nota: Tener cuidado de no perder el resorte del gancho central.

## Colocación del Gancho Central

Colocar el gancho central nuevo en el bastidor inferior del articulador. Empujar los pernos de la bisagra en un lado hasta que comience a entrar en el Gancho Central. Colocar y empujar el resorte en su posición en el Gancho Central, después empujar el perno de la bisagra. Apretar los tornillos de los pernos de la bisagra del Gancho Central. Volver a colocar el bastidor superior del articulador y ajustar la Ranura Central según sea necesario.

