


Instrucciones Kois Plataforma Ajustable


1. Si se usa el articulador de vástago incisal curvo, colocar el vástago en cero. Si se usa el articulador de vástago recto, colocarlo en el anillo central.



2. Colocar la Plataforma Ajustable en la posición de cero con el tornillo de ajuste.

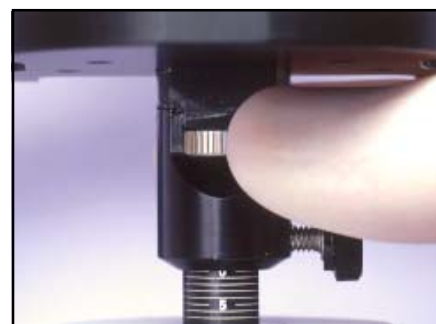


3. Asegurar en su lugar con el tornillo de fijación.

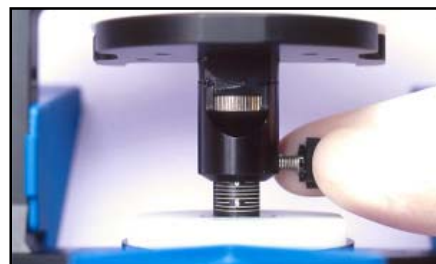

4. Colocar la Plataforma Ajustable en la platina de montaje del bastidor inferior del articulador. Colocar la Charola Guía en la Plataforma Ajustable al alinear los pernos sobresalientes de la Charola en los agujeros de la Plataforma Ajustable. Asentar la Charola totalmente plana en la Plataforma Ajustable.



5. Acomodar el molde de estudio en las impresiones de la Charola Guía. La Plataforma Ajustable se vuelve ahora un sistema de soporte de la horquilla de mordida incorporado. Adicionar yeso a la platina de montaje y al molde para montar el molde maxilar de la manera usual. Ha sido diseñado para que los bordes incisales se encuentren a 100 mm del eje.

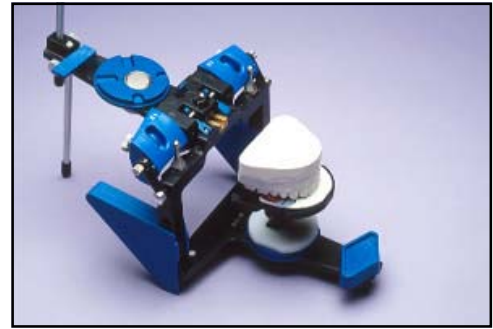


6. Montar el molde mandibular de estudio de la manera regular usando el registro interoclusal y el Pedestal de Montaje Mandibular. Notar que el frente del articulador puede ajustarse hacia abajo con el vástago de soporte para controlar el yeso.




7. La pendiente y la inclinación del plano oclusal, la línea dental media, la posición del borde incisal y de los contornos gingivales se puede diagnosticar ahora para simetría y balance.



8. Usando el tornillo de ajuste, ajustar la plataforma 3 mm hacia abajo de la longitud incisal a fabricar. El molde está ahora suspendido por el vástago incisal 3 mm por encima de la guía encerada.

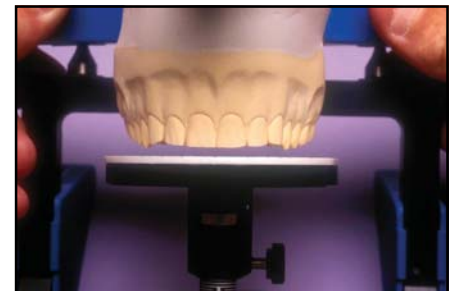

9. El técnico puede adicionar ahora cera o porcelana hasta que toque la guía encerada para determinar la longitud incisal a fabricar. La Guía Encerada de Proporción Áurea puede usarse al mismo tiempo para la anchura de los dientes.

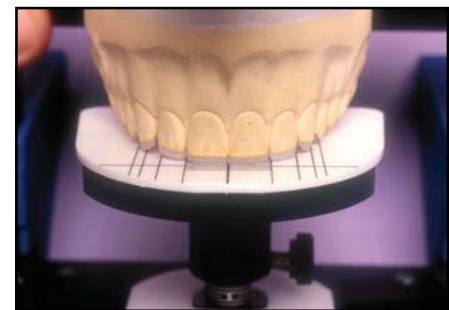

Precisión en la escala vertical $\pm 0,1\text{mm}$

