

## Instrucciones para el Sistema Magna-Split II

1



Fijar la Placa Metálica de Montaje al Articulador con los tornillos fijadores.

2



Unir el Magneto a la Placa de Montaje con el tornillo de montaje.

3




Colocar la placa de plástico en la placa metálica de montaje.

4



Adicionar yeso a la placa de plástico y el molde y montarlos de la manera usual.

5

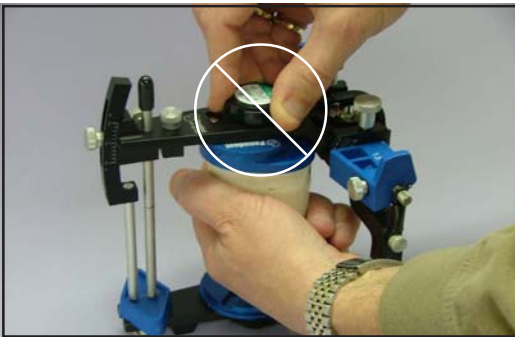

Para evitar perder el montaje del magneto, no tratar de remover los moldes desatornillando la perilla, la placa del magneto y el magneto se caerán o se quedarán en los moldes montados.

6



Para evitar que los moldes se separen de la placa de montaje, sostener el molde y la placa de montaje con el pulgar y los dedos. Ladear lateralmente el molde montado para liberarlo de la placa de montaje. (No jalar los moldes montados)

Revisar y asegurar que el magneto sigue en el articulador, sin el magneto las placas de transferencia no se conectarán.