

# Instrucciones *Proxy-Fit*<sup>TM</sup>

(Para el Mercado de Contactos Ínter-proximales)




1. Recoger una tira de cintas de prueba con fórceps estériles o con pinzas para algodón. Cortar el número de cintas de prueba necesarias (usualmente tres) para tener



2. Sostener la base impresa del papel del paquete de cintas con la mano izquierda. Con el dedo índice de la mano derecha, doblar el lado de las cintas sobre el dedo índice izquierdo.



3. Doblar la tira clara y sostenerla contra la base impresa del papel entre el pulgar y el índice de la mano derecha.

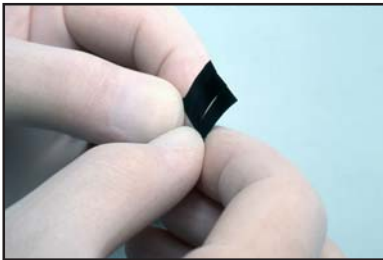


4. Apretar las tiras con los dedos índice de las dos manos en la base de las tiras para doblar la parte protectora y hacer que las tiras queden derechas.




5. Cuando se doblan, la parte trasera del papel y la base impresa hacen una base conveniente para el paquete de tiras.



6. Coger el mango del fórceps con cuatro dedos de la mano derecha, colocar las muñecas juntas para que se apoyen una con otra. Oprimir el botón con el pulgar derecho para abrir los fórceps.

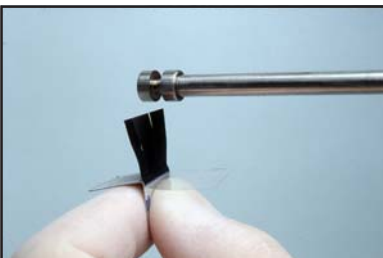

7. Con los fórceps abiertos, colocar el extremo sobre el extremo más lateral de las cintas de prueba.

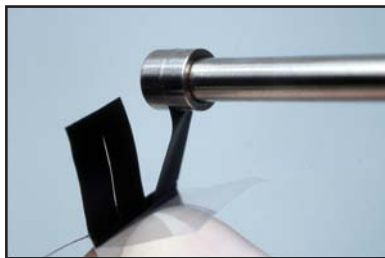

8. Soltar lentamente el botón con el pulgar para agarrar fuertemente la cinta de prueba.



9. Con un pequeño tirón, jalar la cinta hacia uno para liberarlo de la parte adhesiva del paquete.