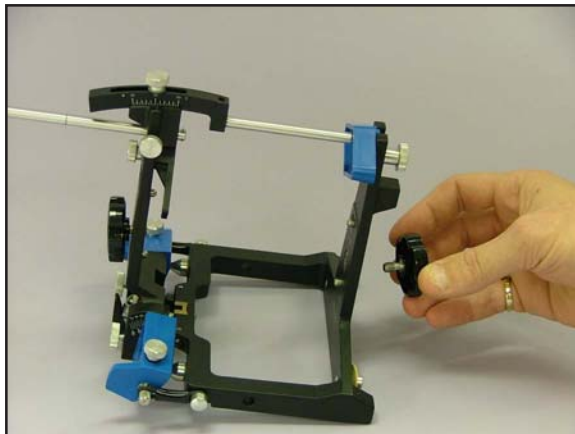


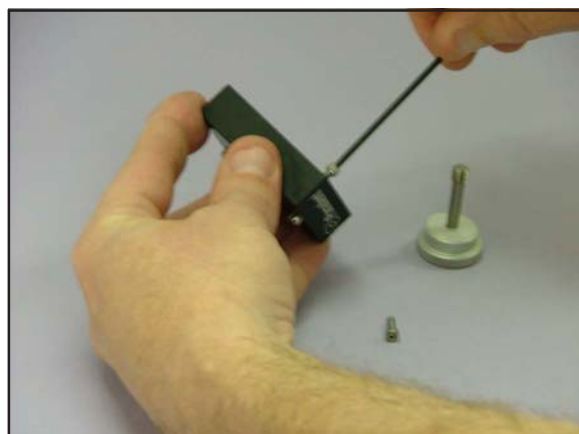
Instrucciones Ensamble Placa de Montaje Espaciadora:

1

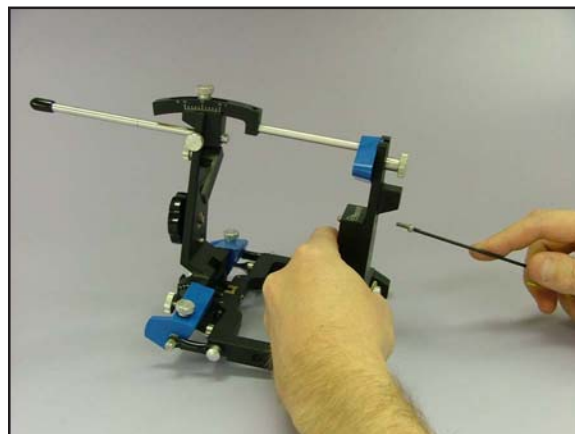
Fotografía de la Placa de Montaje Espaciadora ensamblada.

2

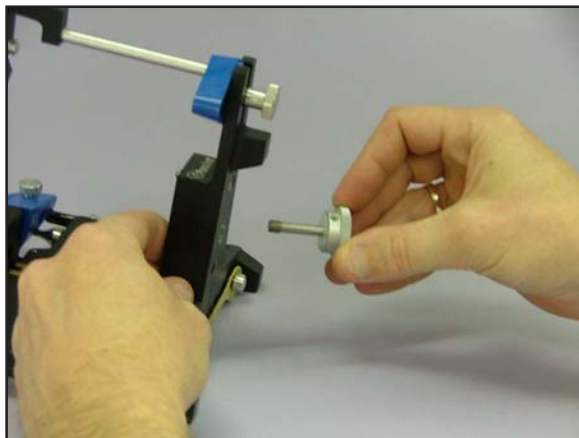
Remover el tornillo de la placa de montaje desenroscándolo en el bastidor inferior del articulador.

3

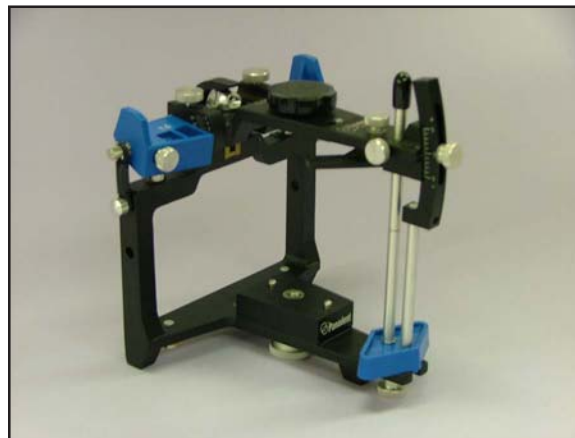
Remover el tornillo largo de la placa de montaje y los tornillos pequeños de sujeción del espaciador ensamblado.

4

Unir el espaciador ensamblado en el bastidor inferior del articulador con los tornillos pequeños de sujeción.

5

Colocar el tornillo largo de la placa de montaje enroscando a través del bastidor del articulador y del espaciador ensamblado.

6

Fotografía mostrando el ensamble completo de la placa de montaje espaciadora en el articulador.