

## Instrucciones para el Estabilizador de la Horquilla de Mordida

■ Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue Colton, California 92324, USA  
(909) 783-1841

Estas instrucciones se aplican a los artículos: REF 4410



1. Colocar lengüetas Bite-Tab en la parte superior de la horquilla de mordida. Ablandar el compuesto en agua tibia (40°C).

2. Colocar la horquilla en la boca del paciente y obtener el indicador de los dientes maxilares en el compuesto Bite-Tab. Remover, enfriar y volver a colocar para verificar precisión.

3. Evaluar la curva de Spee de los dientes inferiores para determinar si el Estabilizador de la horquilla de mordida necesita modificarse. Frecuentemente, los molares secundarios pueden hacer contacto en la horquilla haciéndola su punto de apoyo.



4. Secar la base de la horquilla con una toalla o con aire comprimido.

5. Modificar el estabilizador de la horquilla según se necesite cortando la porción posterior.

6. Remover el papel de la parte de atrás del Estabilizador de horquilla.



7. Fijar el Estabilizador de horquilla en la parte inferior seca de la horquilla.

8. Las piezas cortadas se pueden eliminar o pueden adicionarse en algún área que se necesiten.

9. Con la horquilla colocada en la boca del paciente, pedir al paciente que cierre la boca en la espuma hasta estabilizar. Remover el estabilizador antes del procedimiento de montaje.