

## Instructions relatives au Système Magna-Split II

**1**



Fixez la plaque de montage métallique sur l'articulateur à l'aide des vis de serrage.

**2**



Attachez l'aimant sur la plaque de montage à l'aide de la vis de la plaque de montage.

**3**




Placez le plateau d'indexation en plastique sur la plaque de montage magnétique en métal.

**4**



Ajoutez le plâtre sur le plateau d'indexation en plastique et le moule d'étude aux modèles de montage, de la manière habituelle.

**5**

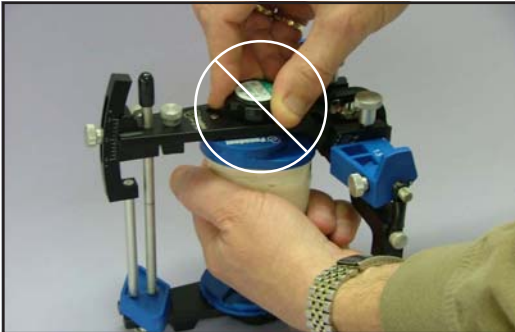

Afin de prévenir toute perte de l'assemblage de l'aimant, n'essayez pas d'enlever vos moules en dévissant le bouton, le capot de l'aimant et l'aimant tomberaient, ou resteraient avec les moules montés.

**6**



Afin de prévenir toute séparation des moules de la plaque de montage, tenez moule et plaque de montage à l'aide de votre pouce et de vos doigts. Faites pivoter l'assemblage du moule monté vers le côté pour libérer le moule de l'aimant de la plaque de montage. (Ne tirez pas sur les moules montés.)

Assurez-vous que votre aimant est toujours sur l'articulateur, sans aimant les plaques de transfert de pierre ne seront pas connectées.



⊗ 2860 S'il est utilisé plus d'une fois, l'insert peut être relâché et le plateau ne s'indexera plus au plateau de la base.