




■ Panadent Corporation
 580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
 (909) 783-1841 • USA & Canada (800) 368-9777

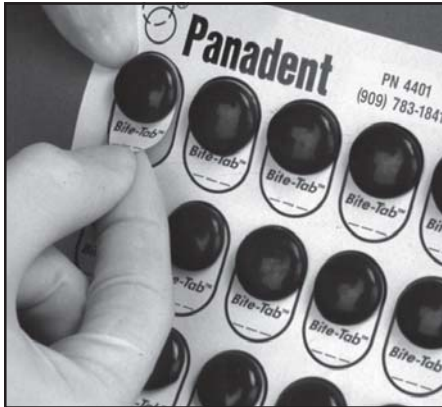

1. Pliez précisément la feuille de protection près de l'extrémité imprimée et ôtez la bande de la **table occlusale** en tirant sur l'extrémité imprimée. (Ne touchez pas à l'adhésif situé en-dessous de la table.)

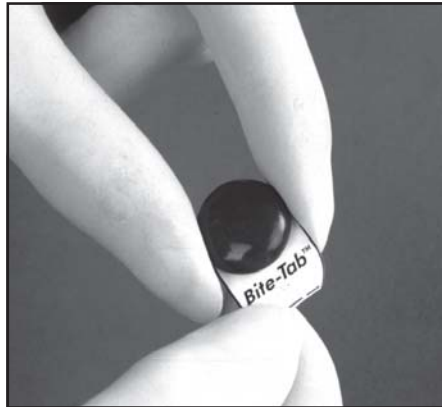

2. Maintenez le matériel de la **table occlusale** sur les bordures latérales de la bande. (Repliez la bande adhésive de la ligne perforée pour un enlèvement plus facile de la bande de **table occlusale** de la fourchette après utilisation.)

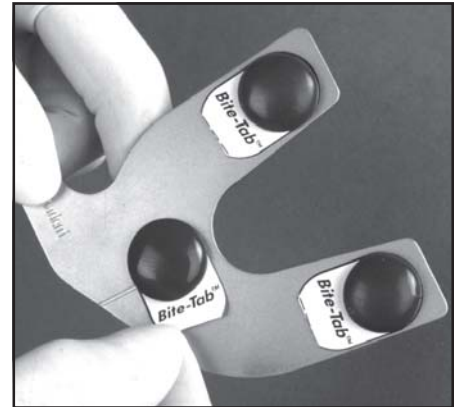


3. Posez en appuyant une bande d'**occlusion** sur chacune des zones suivantes : molaire gauche, molaire droite et incisives des deux côtés sur les deux côtés d'une fourchette occlusale propre. (Ne recouvrez pas la marque de ligne médiane sur la fourchette occlusale.)



4. Maintenez la fourchette occlusale dans de l'eau du robinet chaude (125°F / 40°C) durant une minute environ pour ramollir le matériau de la **table occlusale**. (Ne placez pas la fourchette occlusale dans le bain d'eau, car des résidus de cire et d'huiles présents dans ce bain pourraient empêcher l'adhésion de la **table occlusale** à la fourchette occlusale.)




5. Demandez au patient de mordre lentement dans le matériau de la **table occlusale** afin d'obtenir des empreintes occlusales maxillaires et mandibulaires d'environ 1mm de profondeur. (Évitez tout contact occlusal avec la fourchette occlusale.) Ôtez la fourchette occlusale et faites refroidir le matériel de la **table occlusale** à l'aide d'air comprimé ou d'eau froide.

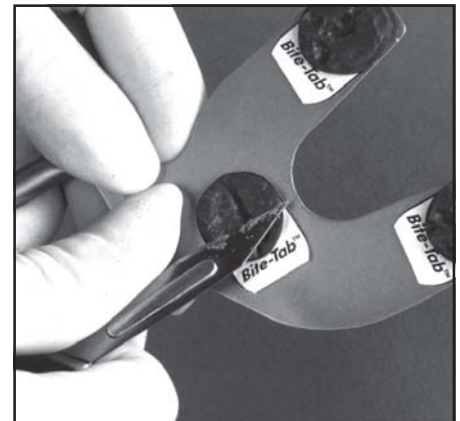


6. Ôtez le matériau en excès en laissant environ 1mm de profondeur de dent ou d'empreintes.



7. Remplacez la fourchette occlusale entre les dents du patient et attachez l'outil d'inclinaison faciale à la fourchette occlusale de la manière habituelle.

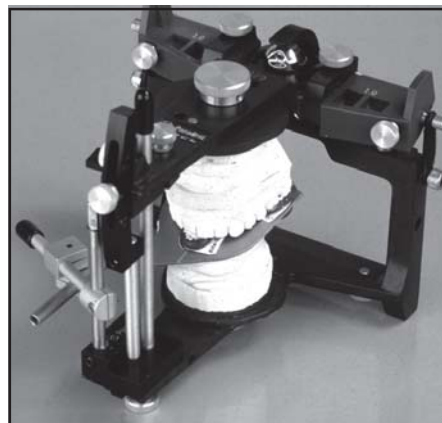

8. Montez la prothèse maxillaire sur l'articulateur à l'aide de la fourchette occlusale. (dans cette image, un assemblage de fourchette occlusale détachable avec élément de montage est présenté.)

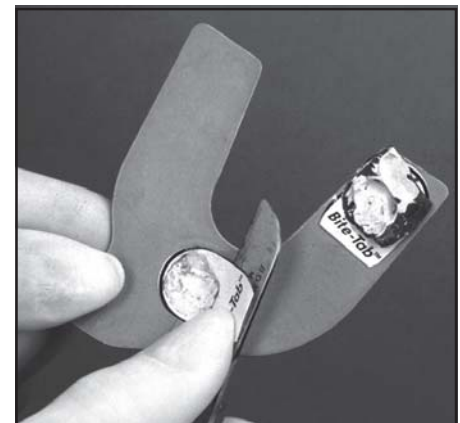

9. Pour ôter les tables utilisées trempez la fourchette occlusale dans de l'eau chaude pour ramollir légèrement le matériau. Utilisez un couteau de laboratoire pour ôter les bandes adhésives.