


Instructions d'assemblage de la plaque de montage

1




Schéma d'assemblage complet d'une entretoise mandibulaire pour plaque de montage

2

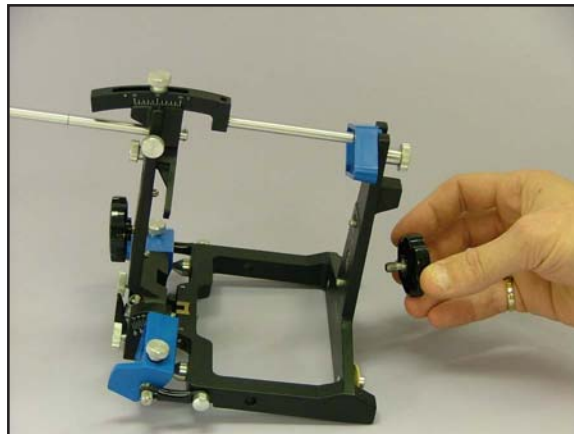


Ôtez la vis de la plaque de montage standard en la faisant passer par le cadre inférieur de l'articulateur.

3

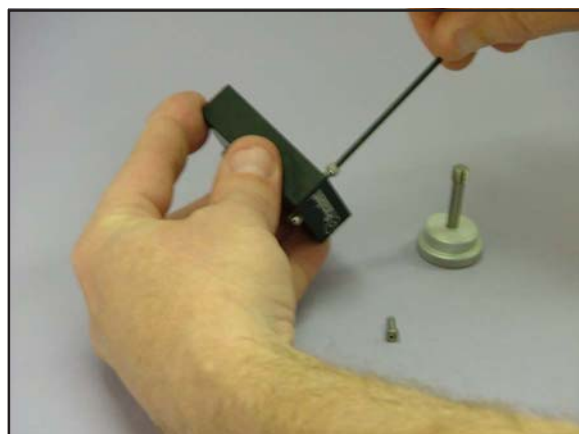


Ôtez la vis étendue de la plaque de montage ainsi que les petites vis de serrage de l'assemblage de l'entretoise.

4

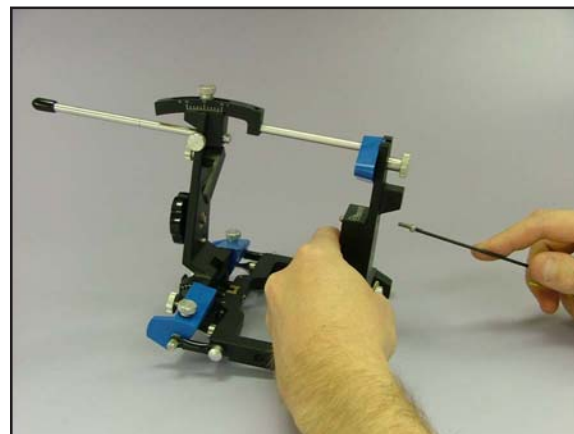


Attachez l'assemblage de l'entretoise au cadre inférieur à l'aide des petites vis de serrage.

5

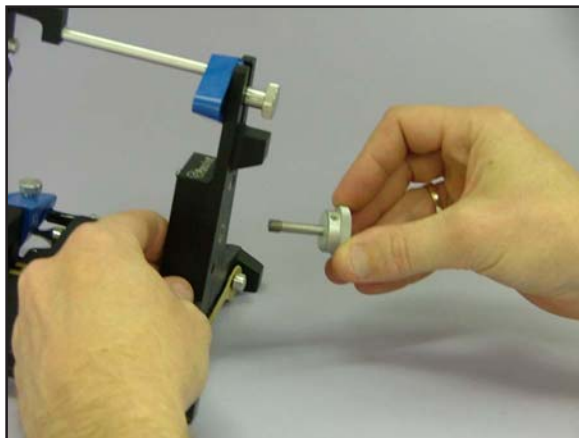

Insérez la vis étendue de la plaque de montage en la faisant passer par le cadre de l'articulateur et de l'assemblage de l'entretoise.

6

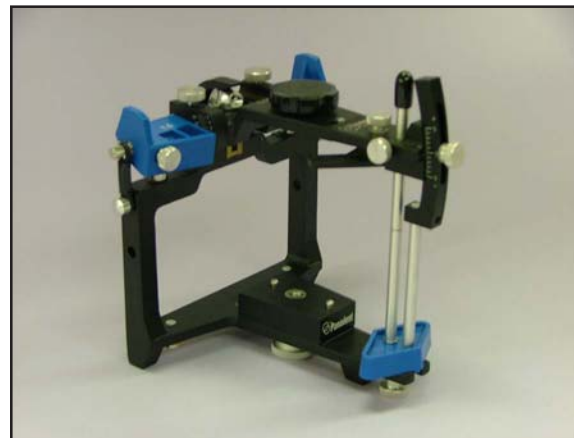

Shéma présentant l'assemblage complet de l'entretoise de la plaque de montage sur l'articulateur.