

Anweisungen zum Austausch des zentralen Riegels

Erforderlich Elemente, um den zentralen Riegel auszutauschen:

- 1 #2023 Zentraler Riegel
- 1 #9702 Verriegelungsfeder
- 1 #9906 Sechskantschlüssel oder (1/16"-Inbusschlüssel)
- 1 #9904 Sechskantschlüssel für den Artikulator oder (3/32"-Inbusschlüssel)

Entfernen des zentralen Riegels:

Die Fingerschrauben an den blauen Analogon lösen, um die Dyna-Verbindungen von den Analogon zu entfernen. Den zentralen Riegel lösen und den oberen Artikulator-Rahmen vom unteren Rahmen entfernen. Den Artikulator halten und mit dem Sechskantschlüssel des Artikulators die Schraube des zentralen Kanals lösen und entfernen. Den zentralen Messingkanal entfernen. Mit einem 1/16"-Sechskantschlüssel die Feststellschrauben der Scharnierstifte des zentralen Riegels lösen. Die Scharnierstifte des zentralen Riegels durch Zugriff durch die Aufnahme des zentralen Kanals hinausdrücken. Den zentralen Riegel entfernen. Hinweis: Stellen Sie sicher, nicht die Feder des zentralen Riegels zu lösen

Platzierung des zentralen Riegels:

Den neuen zentralen Riegel in den unteren Rahmen des Artikulators einsetzen. Den Scharnierstift auf der anderen Seite hineindrücken, bis er gerade beginnt in den zentralen Riegel einzudringen. Die Feder platzieren und in die Position des zentralen Riegels drücken und dann den Scharnierstift hineindrücken. Die Scharnierstift-Feststellschrauben des zentralen Riegels anziehen. Den oberen Rahmen des Artikulators ersetzen und den zentralen Kanal wie erforderlich ausrichten.