

## Anweisungen für das Magna-Split II-System

1



Bringen Sie die Metallmontageplatte am Artikulator mit den Befestigungsschrauben an.

2



Befestigen Sie den Magnet an der Montageplatte mit der Montageplattenschraube.

3




Platzieren Sie die Kunststoffteilscheibe an der magnetischen Metallmontageplatte.

4



Fügen Sie Gips zur Kunststoffteilscheibe und dem Studienabdruck hinzu, um die Modelle in der normalen Weise zu montieren.

5

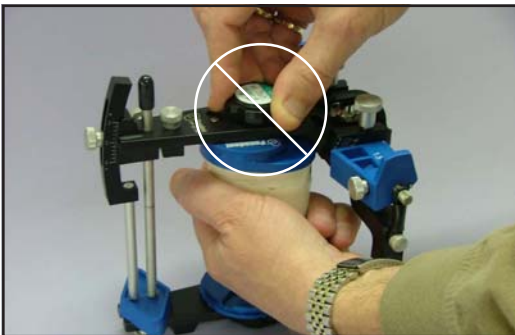

Um den Verlust des Magnetblocks zu vermeiden, versuchen Sie nicht, Ihre Abdrücke zu entfernen, indem Sie den Knopf abschrauben. Das Magnetgehäuse und der Magnet werden herausfallen oder in den montierten Abdrücken verbleiben.

6



Um zu verhindern, dass sich Abdrücke von der Montageplatte trennen, greifen Sie den Abdruck und die Montageplatte mit dem Daumen und den Fingern. Kippen Sie die montierte Abdruckvorrichtung zur Seite, um den Abdruck vom Montageplatten-Magnet zu lösen. (Ziehen Sie nicht an den montierten Abdrücken.)

Prüfen Sie, um sich zu überzeugen, dass sich Ihr Magnet immer noch auf Ihrem Artikulator befindet. Ohne einen Magneten werden sich Ihre Steinübertragungsplatten nicht verbinden.

