


BITE TAB überzeugt bei der Anwendung.



1. Durch leichtes Knicken BITE TAB Aufkleber am bedruckten Ende fassen und mit Folie abziehen (Kleber unter dem Compound-Ende des Tabs nicht berühren).




2. BITE TAB am Compound seitlich festhalten. (Folie an gestrichelter Linie zusammenfallen, nach unten festkleben – Tabs lassen sich so nach Benutzung leichter abziehen).

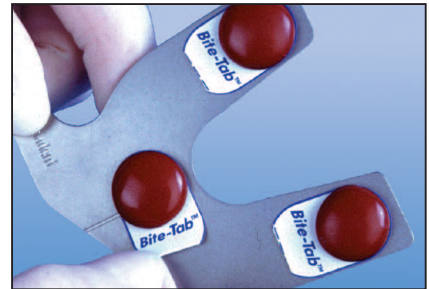


3. BITE TABS jetzt auf saubere, trockene Bissgabel im Molaren- und Frontzahnbereich aufkleben und festdrücken. (Mittellinie der Bißgabel nicht verdecken).



4. Die Bissgabel in ca. 50°C warmem Leitungswasser 1 Minute erwärmen, um das BITE TAB Compound zu erweichen. **(Nie im Wasserbad erwärmen, Wachsreste im Wasser verhindern sicheres Fixieren der Tabs auf der Bißgabel!)**

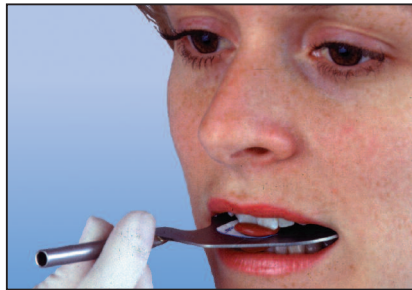


5. Patienten langsam in das weiche BITE TAB Compound beißen lassen, bis ca. 1 mm tiefe Abdrücke des Oberkiefers (ggf. auch des Unterkiefers) sichtbar sind. Bissgabel herausnehmen, mit kaltem Wasser oder Luft BITE TAB Compound abkühlen.

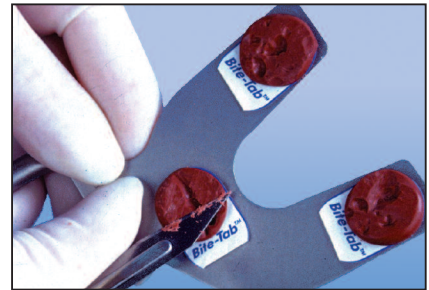


6. Anschließend ggf. überschüssiges Compound mit Skalpell zurückschneiden, bis ca. 1 mm tiefe Zahn- oder Zahnkammeindrücke zurückbleiben. Ggf. Impressionen mit ZOE-Paste unterfüttern.



7. Bissgabel wieder mit den Zahnabdrücken im Mund des Patienten replizieren, dann Gesichtsbogen anlegen.

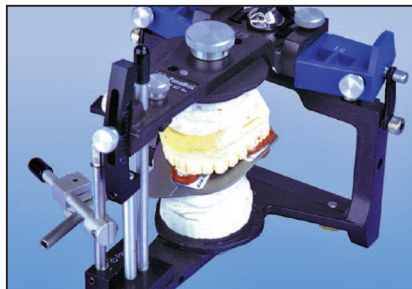

8. Anschließend Oberkiefermodell wie gewohnt im Artikulator einartikulieren (hier mittels abnehmbarer Bissgabel und Montageschuh).

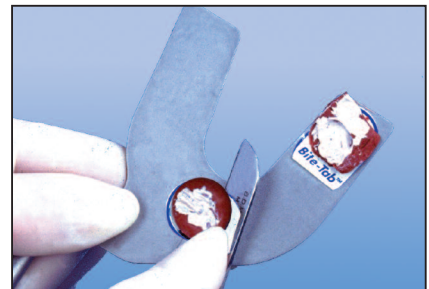

9. Benutztes BITE TAB Compound mit stumpfem Messer entfernen, dann Klebestrips abziehen. Bissgabel säubern, mit Desinfektionslösung abwischen, trocknen und sterilisieren und so zur nächsten Benutzung vorbereiten.

CE
0470

HINWEIS
BITE TAB Compound Aufkleber
nie im Wasserbad erwärmen,
Wachsreste im Wasser
verhindern sicheres Fixieren
der Tabs auf der Bißgabel!

PR-070/09.08

Bestell-Information:

0-4405 BITE TAB 180 Stück

LOSER & CO

öfter mal was Gutes...



LOSER & CO GMBH · VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRASSE 1c, D-51381 LEVERKUSEN
TEL.: 0 21 71/70 66 70 · FAX: 0 21 71/70 66 66
e-mail: info@loser.de



Panadent

MADE IN USA
(US- und Auslandspatente angemeldet)