

1

Sostituire gli analoghi di movimento della
branca mascellare dell'articolatore con i
posizionatori condilari.



2

La vite più grande presente sulla parte
superiore dell'alloggio può essere regolata
per muovere verso l'alto o verso il basso
l'elemento dell'asse condilare
dell'articolatore. La vite più grande presente
sulla parte posteriore dell'alloggio può
essere regolata per muovere avanti o indietro
l'elemento dell'asse condilare
dell'articolatore. Le viti più piccole bloccano
le due viti di regolazione appena descritte.



3

4



Collocare la branca mascellare dell'articolatore al di sopra della branca inferiore.

5



Rimuovere i collari dall'asse dei posizionatori condilari per permettere i movimenti laterali della mascella o della mandibola. Sugli assi dei posizionatori condilari sono segnate linee calibrate da 1 mm.

6



La posizione centrica è individuata quando entrambe le viti più grandi sono in contatto o al livello delle superfici interne dell'alloggio e quando le linee presenti sulla testa delle viti di regolazione più grandi combaciano con la linea presente sull'alloggio. Un giro completo di ognuna delle viti corrisponde a 1 mm.

7




Abbassando la vite di regolazione superiore è possibile simulare l'inclusione della mascella.

Spingendo in avanti la vite di regolazione posteriore è possibile simulare l'avanzamento della mandibola.



8

Spingendo verso il basso la vite di regolazione superiore e in avanti la vite di regolazione posteriore è possibile simulare un'autorotazione della mandibola.

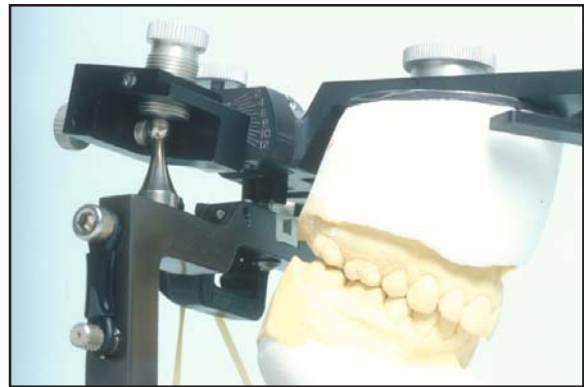

9