



Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841



Le presenti istruzioni sono valide  
per i seguenti prodotti:  
REF 4094



Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841




Le presenti istruzioni sono valide  
per i seguenti prodotti:  
REF 4094

## Istruzioni dell'Adattatore Denar



Fissare l'adattatore Denar alla  
branca inferiore dell'  
articolatore Dentar facendo uso  
della vite della piastra di montaggio.

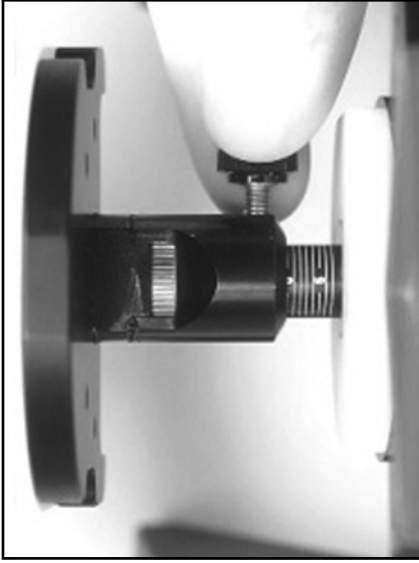


Considerata l'altezza ridotta  
dell'articolatore Denar,  
la Piattaforma Kois deve essere  
abbassata completamente  
(-6 mm)  
prima di montare il calco.



Collocare la Piattaforma Panadent  
Kois sull'adattatore  
Denar presente sull'articolatore.  
Seguire quindi le procedure  
di montaggio indicate all'interno del Manuale  
Kois.



Fissare l'adattatore Denar alla  
branca inferiore dell'  
articolatore Dentar facendo uso  
della vite della piastra di montaggio.

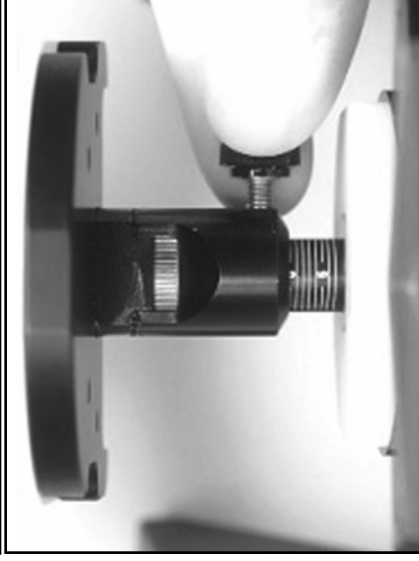

Considerata l'altezza ridotta  
dell'articolatore Denar,  
la Piattaforma Kois deve essere  
abbassata completamente  
(-6 mm)  
prima di montare il calco.



Collocare la Piattaforma Panadent  
Kois sull'adattatore  
Denar presente sull'articolatore.  
Seguire quindi le procedure  
di montaggio indicate all'interno del Manuale  
Kois.

