

Istruzioni del sistema Magna-Split II

1



Fissare la piastra di montaggio metallica sull'articolatore facendo uso delle apposite viti.

2



Fissare il magnete sulla piastra di fissaggio con la vite dedicata.

3




Collocare la base in plastica sulla piastra di montaggio magnetica in metallo.

4



Collocare del gesso sulla piastra in plastica e sul calco di studio per montare i modelli come di consueto.

5

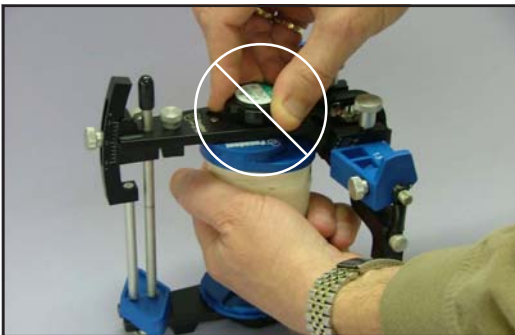

Per non perdere il gruppo magnete, non tentare di rimuovere i calchi svitando la manopola: l'alloggio del magnete e il magnete stesso potrebbero cadere o rimanere agganciati ai calchi montati.

6



Per evitare che i calchi si separino dalla piastra di montaggio, tenere saldamente i calchi e la piastra con il pollice e le dita. Poggiare su un lato il gruppo per il montaggio del calco per separare il calco dal magnete della piastra di montaggio. (Non tirare i calchi).

Verificare che il magnete sia ancora presente sull'articolatore: senza un magnete, le piastre di trasferimento per il gesso non potranno unirsi.

