



Istruzioni dell'Articolatore in Plastica - modello ridotto (PAL™)

Una nuova soluzione, un punto d'incontro tra gli articolatori monouso e gli articolatori semiregolabili.

- Asse anatomico di rotazione (uguale a quello presente sull'articolatore standard)
- Guide orizzontali e verticali
- Supporto di sostegno integrato

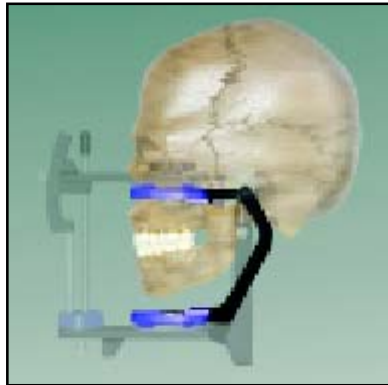

- Piastra di montaggio dal design innovativo
Una base per l'articolatore PAL...
E un'altra per l'articolatore standard
- Monouso o parzialmente riutilizzabile
- Per separare le branche, aprirle formando un angolo di 100°

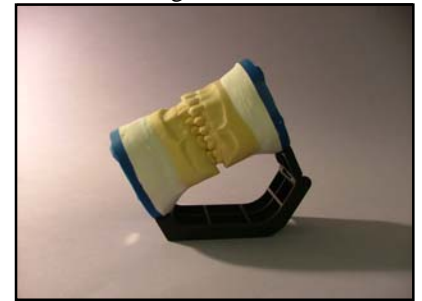

Istruzioni:



1. Montare i calchi di studio sulle piastre di montaggio magnetiche sull'articolatore Panadent standard (modello PCH o PSH), utilizzando il Sistema per Analisi Dentofacciale Kois o l'arco facciale tradizionale Pana-Mount e una chiave di registrazione interocclusale.



2. Rimuovere i calchi di studio dalle piastre di montaggio dall'articolatore Panadent standard e inserirle nel nuovo articolatore Panadent modello PAL, collocandole nell'alloggio dedicato presente nella parte posteriore della piastra di montaggio magnetica.



3. Dopo aver eseguito le procedure di laboratorio per le ricostruzioni, i calchi di studio possono essere separati dall'articolatore PAL esercitando pressione sul bottone di sbloccaggio presente sulla parte inferiore della piastra di montaggio magnetica in plastica.



4. I calchi di studio possono ora essere collocati nuovamente nell'articolatore Panadent standard. In questo modo, è possibile verificare la qualità delle ricostruzioni, utilizzando come guide gli analoghi di movimento curvilinei, e, se necessario, eseguire le ultime regolazioni.