

Le seguenti istruzioni sono  
valide per i seguenti prodotti:

REF 3001

È compreso:

3060  

## Proxi-Fit™ Istruzioni

(Per la marcatura dei contatti interprossimali)



1. Prendere una striscia del nastro per test facendo uso di pinze chirurgiche o pinzette per medicazione. Tagliare il numero desiderato di nastri per test (tre, solitamente) per creare un elemento di marcatura personalizzato.



2. Tenere con la mano sinistra la base stampata del nastro. Con l'indice della mano destra, piegare il nastro nella direzione dell'indice sinistro, come indicato in figura.



3. Piegare il foglio trasparente e premerlo sulla base di carta (stampata) con il pollice e l'indice della mano destra.




4. Con i pollici e gli indici di entrambe le mani, fare aderire i fogli trasparenti e quelli di sostegno alla base dei nastri per far piegare i fogli protettivi e far sì che i nastri restino eretti.




5. Se piegati, i fogli di sostegno e la base di carta stampata creano un comodo sostegno per il nastro.



6. Tenere la pinza chirurgica con le quattro dita della mano destra e avvicinare i polsi in modo che si sostengano reciprocamente. Per aprire i bracci della pinza, premere il bottone dedicato con il pollice destro.

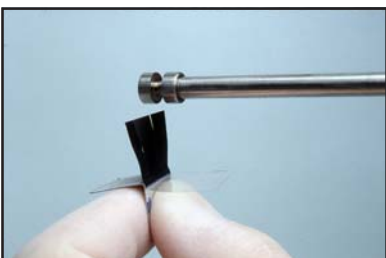

7. Aprire i bracci della pinza e posizionarli sopra la terminazione superiore del nastro da test laterale.

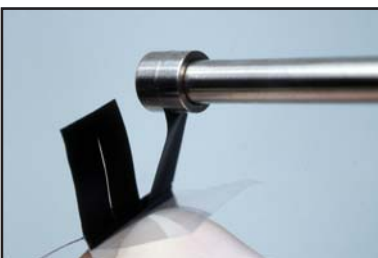

8. Rilasciare lentamente il bottone per afferrare saldamente il nastro.



9. Tirare rapidamente verso di sé il nastro per separarlo dalla parte adesiva.



 3060: Non utilizzare più di una volta al fine di evitare la contaminazione crociata tra i pazienti.