


Instrucciones para el Soporte Magnético de la Horquilla de Mordida

1



Remover la mesa plástica incisal del articulador.

2

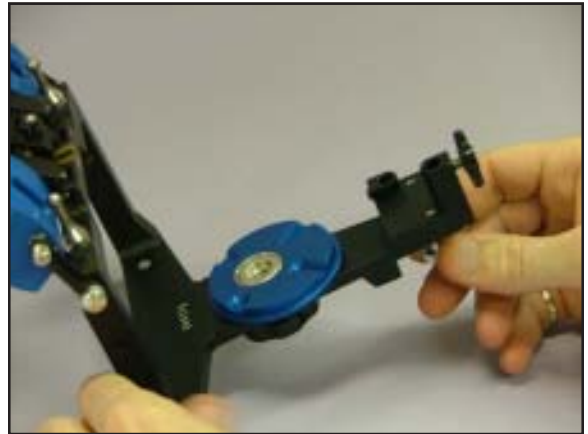


Colocar el aditamento de montaje en la ranura de la mesa incisal y asegurarlo con el tornillo.

3



Colocar el soporte magnético de la horquilla de mordida.

4

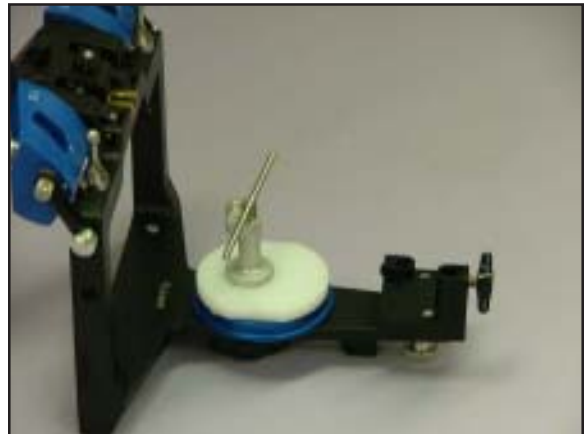

Asegurarse que el vástago del soporte del molde está ajustado completamente.

5



Colocar y asegurar el ensamble de la horquilla en el aditamento de montaje.

6



Levantar suavemente el vástago de soporte hasta que toque la horquilla y asegurarlo en su lugar con el tornillo. Montar el molde de estudio de la manera usual.